

Overtrykksboks – bruksanvisning



- Fest infusjonssettet til infusjonsposen.
- **NB!** Fjern all luft fra infusjonsposen.
- Plasser infusjonsposen i overtrykksboksen og lukk døren med dørklemmen (1).
- Sett kontrollbryteren i posisjon «ON» (2).
- Overtrykksboksen genererer ved oppstart det samme trykket som ved siste gangs bruk. Ved behov for å justere trykket, trekk ut regulatorhjulet (3).
- Juster trykket ved å:
 - Skru regulatorhjulet mot høyre for å øke trykket.
 - Skru regulatorhjulet mot venstre for å redusere trykket.
 - Trykk inn regulatorhjulet for å låse trykket.
- Utstyret bør sjekkes jevnlig for sprekker og andre ødeleggelser. Ved sprekker i døren, bør denne erstattes før den tas i bruk.

Advarsel! Boksen har ingen fysisk sperre ved innstilling av trykk. Ved bruk av overtrykk over 300mmHg gjelder kliniske retningslinjer. Trykk over 300mmHg skal brukes med forsiktighet og av kyndig personell.