

LUCAS™ 2

HJERTEKOMPRESJONSSYSTEM

HURTIGVEILEDNING

Merk: Denne veiledningen er ikke en fullstendig bruksanvisning. Les bruksanvisningen for fullstendige anvisninger for bruk, indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og potensielle uønskede hendelser.



PÅ/AV



JUSTERING



PAUSE



AKTIV
(kontinuerlig)




AKTIV
(30:2)

Bekreft hjertestans og start manuell gjenoppliving med minst mulig avbrudd til LUCAS er montert og klargjort.




1 Aktiver (A)

- Hold inne **PÅ/AV** i 1 sekund for å starte selvtesten og slå på LUCAS

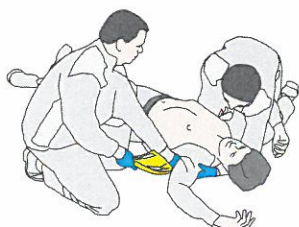


2 Ryggplate (B)

- Ta pause i manuell hjertekompresjon
- Legg ryggplaten forsiktig under pasienten, under armhulene
- Gjenoppta manuell hjertekompresjon

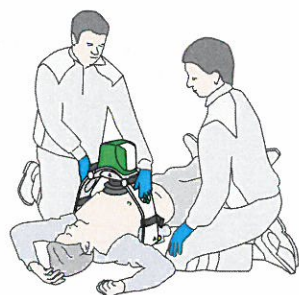

3 Kompressor (C)

- Trekk én gang i utløserringene for å åpne låsene. Slipp deretter utløserringene
- Fest til ryggplaten. Lytt etter et "klikk"
- Trekk opp for å kontrollere at enheten sitter som den skal

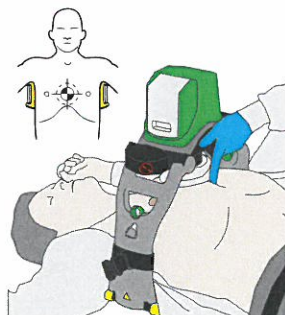


4 Plasser sugekoppen

- Midtstill sugekoppen over brystet
- Den nedre kanten på sugekoppen skal være rett over kanten på brystbenet


5 Trykk ned sugekoppen

- Trykk ned sugekoppen med to fingre (kontroller at enheten står i **JUSTERING**-modus)
- Trykkputen inne i sugekoppen skal berøre pasientens bryst. Hvis puten ikke berører eller sitter som den skal, fortsetter du manuell kompresjon
- Trykk **PAUSE** for å låse startposisjonen, og fjern deretter fingrene fra sugekoppen

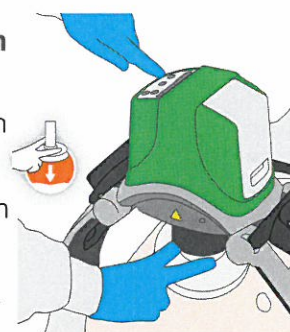


6 Start kompresjonen

- Kontroller at posisjonen er riktig. Juster om nødvendig
- Trykk **AKTIV (kontinuerlig)** eller **AKTIV (30:2)**
- LUCAS gir hjertekompresjon i henhold til retningslinjene

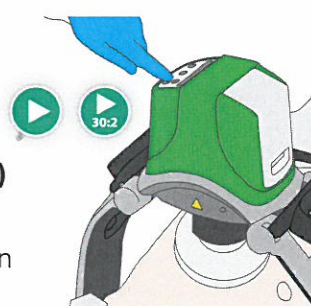

7 LUCAS stabiliseringsstropp

- Fest LUCAS-stabiliseringsstroppen

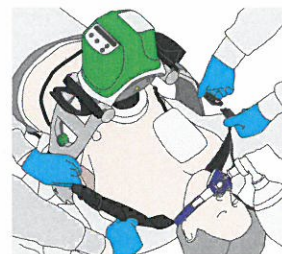

Følg alltid lokale og/eller internasjonale retningslinjer for hjertekompresjon ved bruk av LUCAS.

PHYSIO
CONTROL

LUCAS™ 2 hjertekompresjonssystem produseres av JOLIFE AB i Sverige, og distribueres over hele verden av Physio-Control, Inc. Informasjon om lokale forhandlere finnes på www.physio-control.com.

LUCAS™ 2 Hjertekompresjonssystem – Bruksanvisning
100901-07 Rev. A, Gyldig fra CO J2698 © 2014 Jolife AB