








# BLT V6 – Kort brukerveiledning


1. Alarmlampe
2. Teknisk alarmlampe
3. Display
4.  NIBP: Knapp for å starte/stoppe NIBP
5.  SKRIVER: Starte/stoppe skriver (tillegg)
6.  REAKTIVERE ALARM:
  - Trykk en gang for å reaktivere eller pause alarmene
  - Hold knappen inne i 1 sekund for å slå av systemets lyd
7.  Trykk på denne knappen for:
  - Endre oppsett på skjerm
  - Returnere tilbake til hovedskjerm når en meny åpnes
8. Manøvrerbart hjul:
  - Vri til høyre/venstre for å flytte markøren
  - Trykk ned for å utføre en operasjon
9. NIBP kontakt
10. CO<sub>2</sub> kontakt
11. SpO<sub>2</sub> kontakt
12.  På/av knapp
  - Press for å skru på apparatet
  - Hold inne i 2 sekunder for å skru av apparatet
13. Strøm indikator  
LED lampe som lyser grønt og oransje:
  - Oransje: Når strømenheten ikke er tilkoblet strømnettet men går på batteri
  - Grønt: Når enheten er tilkoblet strømnettet
  - AV: Når strømenheten ikke er tilkoblet
14. Batteri indikator
  - Lyser opp: batteriet lades
  - AV: Batteriet er fulladet eller uten batteri
15. Håndtak



## Start monitorering

1. Trykk på av/på knappen (12) for å skru på apparatet (hold inne for å skru av)
2. Koble til sensorer som skal brukes under monitoreringen
3. Velg pasientstørrelse (voksen, barn, neonatal)
4.  Start blodtrykksmåling. Bruk evt. samme tast for å avbryte.
5. Velg NIBP i hovedbildet med dreiehjulet for intervallmåling og NIBP oppsett. Bekreft med RETUR.  
Start intervallmålingen med  . Intervalltiden vises i skjermbildet

6. Drei på hjulet for å markere menyen, trykk for å åpne hovedmenyen

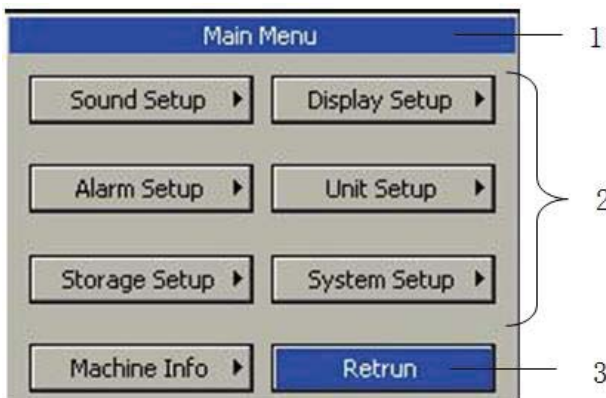

7. Innstillinger for SpO2 og Pleth (kurve) finnes ved å velge disse i hovedbildet med dreiehjulet.
8. Øvrige innstillinger finnes ved valg av MENY nederst til venstre i hovedbildet, eller med hurtigtasten til høyre.
9. Oransje alarm hurtigtasten til høyre, avstiller alarmen (se pkt 6 på side 1)