

S9 serien

- VPAP
- CPAP
- ASV- CS(A)
- Auto- 25.



Nettstrømforsyning. Obs pinnene i kontakten på kabel ved tilkobling.

S9- Auto-Set CS(A) ser litt annerledes ut enn den øvrige serien da denne har muligheter for alarmer. Maskinen brukes på samme måte.

Display hvor man justerer evt. ramp-tid, temperatur på varmfukter og slangetemperatur

H5 i varmfukter

Start/ stopp

Hjulet- man kan dreie og trykke på hjulet for å velge og bekrefte innstillinger

S9 serien kan brukes både uten – og med varmfukter.

S9 uten varmfukter med enkel slange (SlimLine)

Slim Line slangen er lik i begge ender og er uten varmevarmetråder.



Slim Line slange

H5i varmfukter med tilhørende slange (ClimateLine)

Oppkoblet med varmfukter H5i og tilhørende slange med varmetråder.

Det er 2 innstillinger på temperatur

Temperatur på varmfukter

Stilles inn når slangen ikke er klikket i lås bak på varmfukter. Vises som en dråpe i displayet. Innstilling 1- 6. Velg temperatur og bekreft ved å trykke på hjulet (=blå bakgrunnsfarge).

Temperatur på varmetråder i slangen

Slangen må da være klikket i lås bak på varmfukter, og vises i displayet som dråpe og termometer. Standard innstilling 27 grader. Pasienten velger temperatur og bekrefter ved å trykke på hjulet (=blå bakgrunnsfarge). Når pasienten slår på maskinen vises slangetemperatur med gul oransje lys, hvilket indikerer at pasienten kan justere på temperatur. Evt. bekrefte innstilling - eller justere - og bekrefte ved å trykke på hjulet.



H5i vannbeholder

Skifte vann hver dag. Sterilt vann i sykehus/ institusjon, kommunalt vann hjemme.
Vannbeholderen demonteres (se egen bruksanvisning) og vaskes i varmt (ikke kokende) såpevann (Zalo eller lignende) 2 ggr/ uke i sykehus/ institusjon og 1 gang/ uke hjemme.
Obs pakning i lokket ved rengjøring.



Temperatur på varmfukter vises som blå dråpe i displayet (når slangen ikke er vridd i lås). Drei med hjulet for å merke dråpen blå. Trykk - og dreie på hjulet for å justere- og bekreft ny innstilling ved å trykke på hjulet.



Slangetemperatur vises som termometer + dråpe i displayet- når ClimateLine slangen er vridd i lås bak på maskinen. Drei med hjulet for å merke ikonet. Trykk deretter på hjulet. Ikonet blir gulorange på farge og man kan dreie på hjulet for å endre temperatur. Ny innstilling bekreftes ved å trykke på hjulet. Merk: Dette kan også gjøres når maskinen startes.



Noen brukere trenger Ramp- tid. Maskinen bruker innstilte minutter på å komme opp i behandlingstrykk. Bruker kan selv justere på Ramp- tid innenfor gitte rammer i klinisk meny.

Luftinntak- filter.
Skiftes (kastes) ca. hver 4.-6. mnd.
hjemme, månedlig i sykehus/
institusjon.



Oksymetri på S9

Oksymetri kan gjøres mens bruker er tilkoblet S9 maskinen. Man kobler da på en S9 oksymetri- adapter og en ResLink kabel med fingerprobe.



1. Klem inn fjærer her ved på/avkobling på maskinen
2. ResLink kabel festes her
3. Klikkes på maskinen
4. Låsmekanisme til maskinen (se pkt 1)



Oksygen tilkobling

Med varme fukter



Med varme fukter tilkoblet

Hvis man skal bruke varme fukter må mellomstykket (det grønne) kobles mellom maske og VPAP slange (nærme bruker).

Uten varmfukter



Mellom stykket tilkobles



Koble på oksygenlangen på nippelen.



Slange tilkobles, ferdig tilkoblet.

Avlesning av maskindata (maskinlogg)

Sende inn minnebrikken:

Trykk på minnebrikken bak på maskinen og den spretter litt ut slik at du får tak i den og kan ta den ut.



Husk å sende med navn og fødselsdata når du sender inn minnekort eller søvnregistrering.