




MAC VU360 Hvile-EKG system fra GE Healthcare

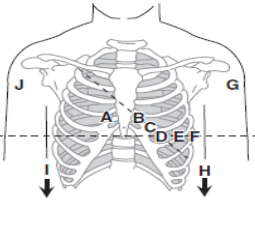

		IEC-merke	Elektrodeplassering
	A	C1 rød	Fjerde interkostalrom ved høyre sternalkant.
	B	C2 gul	Fjerde interkostalrom ved venstre sternalkant.
	C	C3 grønn	Midt mellom område B og D.
	D	C4 brun	Midtre klavikulærlinje i femte interkostalrom.
	E	C5 sort	Fremre aksillarlinje på samme horisontale nivå som D.
	F	C6 lilla	Midtre aksillarlinje på samme horisontale nivå som D og E.
	G	L gul	Venstre deltamuskel.
	H	F grønn	Over venstre ankel. (Alternativ plassering, øvre del av beinet så nær brystet som mulig.)
	I	N svart	Over høyre ankel. (Alternativ plassering, øvre del av beinet så nær brystet som mulig.)
	J	R rød	Høyre deltamuskel.

EKG med Pasientdata

1. Slå på apparatet
2. Trykk «Start ny pasient»
3. Skann eller legg inn pasientinformasjon og trykk «Lagre»
4. Koble til pasienten – EKG tas automatisk når du har gode signaler på alle avledninger
5. Forhåndsvisning av EKG – Trykk «Aksepter»,
6. Koble fra pasienten før du trykker «Fullført». Velg så «Start ny pasient». Om du ønsker å ta et nytt EKG av samme pasient trykker du på «Fortsett med samme pasient»

(Personnummer, kjønn og alder er viktig mht. til målinger og tolkning.
HUSK at ID er riktig til riktig pasient)

Digital RYTMEUTSKRIFT

1. Slå på apparatet
2. Trykk «Start ny pasient»
3. Legg inn pasientinformasjon og trykk «Lagre»
4. Koble til pasienten
5. Trykk på «rytme»
6. Avslutt «rytme»
7. Trykk «Fullført» og velg så «start ny pasient»

Om du ønsker utskrift trykker du på «Kopier» før du trykker på «Fullført»