

Kort Bruksanvisning


GE OEC Elite Miniview



Dette er en forkortet og forenklet utsnitt av brukermanualen. For komplett informasjon må man alltid lese den komplette brukermanualen.

Transport av apparatet

Ved transport av apparatet skal alltid C-buen være låst i parkeringsposisjon.

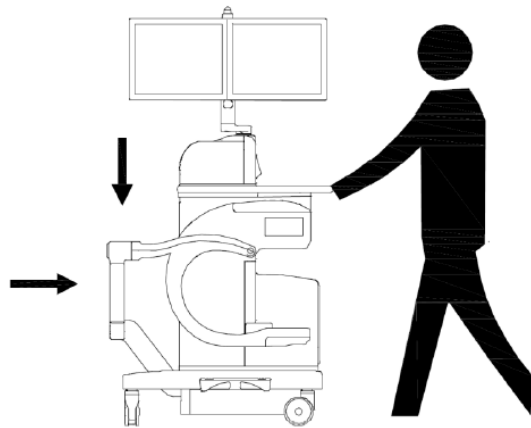

Lås hjulene før apparatet skal tas i bruk

Slå på apparatet

Vri nøkkelbryteren på det eksterne grensesnittet for å aktivere røntgen.

Nøkkelbryteren aktiverer/deaktiverer røntgen. Nøkkelbryteren har 3 posisjoner:



Posisjonen På. C-armen er i full drift.



Posisjonen Røntgen av. Røntgen er deaktivert.



Posisjonen Av. Røntgen er deaktivert, og nøkkelen kan fjernes fra systemet, men C-armen får fremdeles strøm.

Trykk på av/på-bryteren til MiniView-systemet. Lyset inni bryteren tennes, noe som angir at strømmen er PÅ. Systemet starter oppstartssekvensen. Feltstørrelsen er i normal tilstand som standard. Automatisk fluoroskopimodus er valgt.


Systemet er klart til bruk når påloggingsskjerm bildet eller skjerm bildet Exam Management (Undersøkellesstyring) vises på den høyre monitoren. Oppstartstiden er ca. 2 minutter.

Slå av apparatet



Trykk på og hold inne av/på-bryteren til MiniView-systemet i mer enn 2 sekunder. Lyset inni bryteren slukkes, noe som angir at strømmen er AV.

Systemtastatur med spesialfunksjoner

Kontrollene for MiniView-systemtastaturet omfatter taster for navigering, tekstangivelse, bildebehandling og funksjoner.

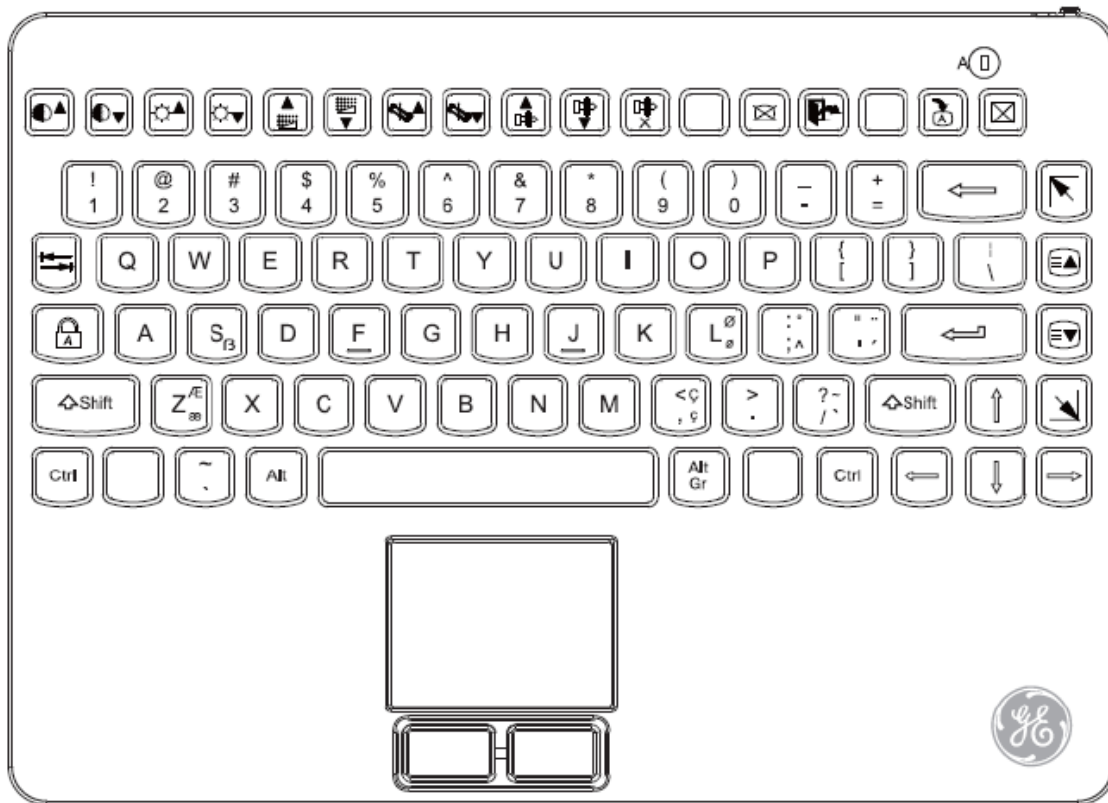

Kontrollpanel for C-buen

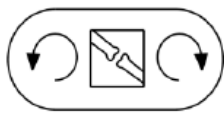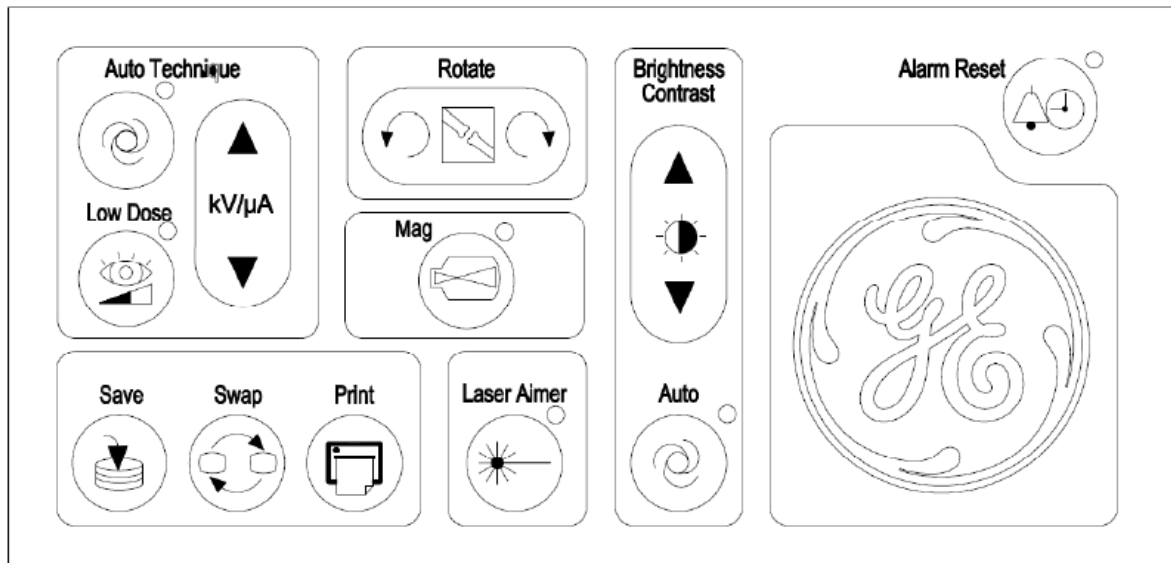

Roter bilde



Bytt




Forstørrelsesmodus



Skriv ut



Lasersikte

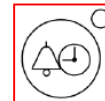

Tilbakestill alarm



Lagre



Låseknapp for bevegelser