



Skjerm bilde ved valg 1. Operasjonslampe

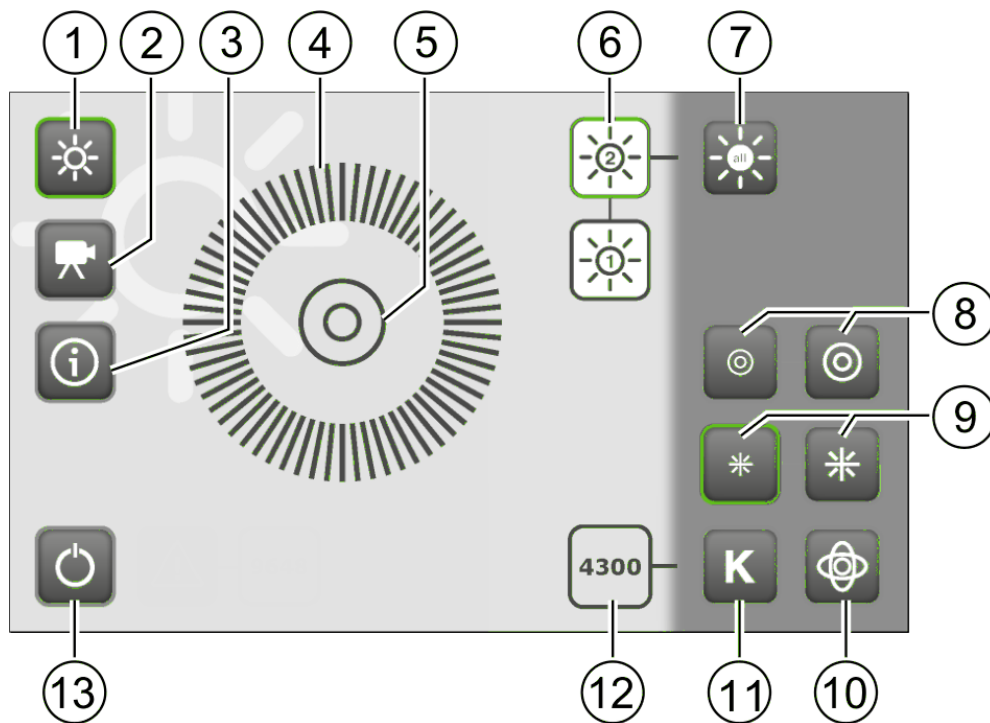

- 1 Velger operasjonslampebetjening
- 2 Velger kamerabetjening
- 3 Info
- 4 Indikerer lysstyrke
- 5 Indikerer lysfeltstørrelse
- 6 For betjening av individuelt lampehode 1 eller 2
- 7 For betjening av begge lampehodene samtidig
- 8 Lysfelt , mindre / større
- 9 Lysintensitet , lavere / høyere
- 10 Endrer lysfelt sirkulært / ovalt, vertikalt/horisontalt
- 11 Endrer fargetemperatur 3800/4300/4800
- 12 Viser gjeldende fargetemperatur
- 13 AV / PÅ Bryter
Trykk ca. 2 sekund for å slå av

Skjerm bilde ved valg 2. Kamerakontroll

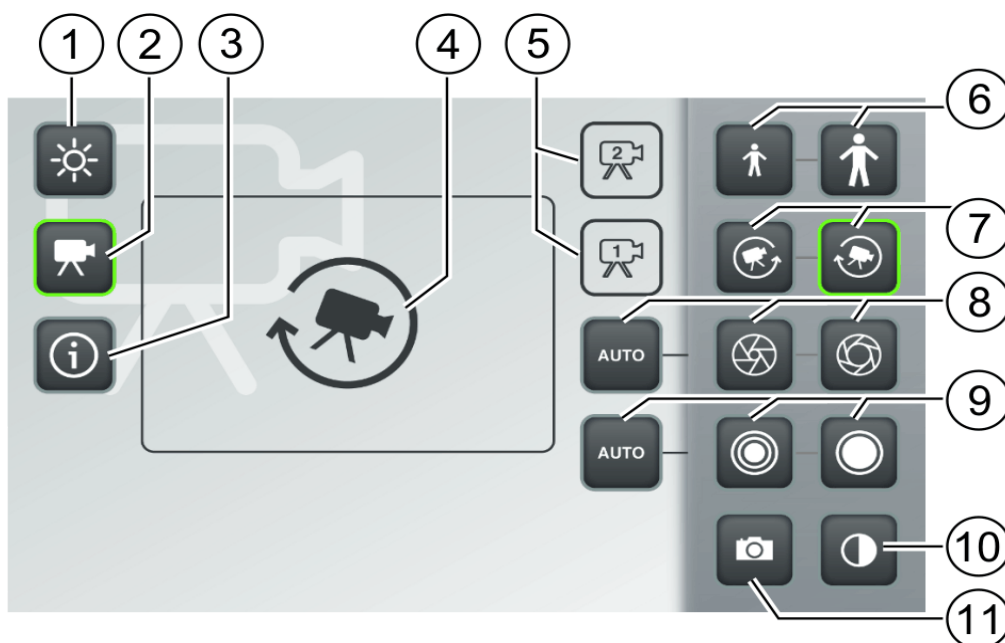

- 1 Velger Operasjonslampebetjening
- 2 Velger Kamerabetjening
- 3 Info
- 4 Viser gjeldende justeringsvalg
- 5 Valg av kamera ved flere
- 6 Zoom, inn / ut
- 7 Rotere kamera
- 8 Lysstyrke AUTO, mindre / større
- 9 Fokus AUTO, nær / fjern
- 10 Hvit balanse
- 11 Remote for evt. lagring av bilde