


- 1 PÅ / AV knapp med grønn LED: **ON**: LED lyser / **OFF**: LED slukker
Trykk AV / PÅ bryter minst 1 sekund.
- 2 **Fargetemperatur**
Fargetemperaturen er forhåndsinnstilt til 4,300 K. Denne funksjonen gir deg mulighet til å velge følgende verdier: 4,300 K – 4,800 K – 3,800 K. Valgt verdi er vist med rød, hvit eller blå indikator
- 3/4 **Lysfeltstørrelse**
(8) Størrelsen på lysfeltet kan justeres ved å bruke knapp 3 (mindre) og knapp 4 (større)
Aktuell størrelse vises indikatorer (8)
- 6/7 **Lysstyrke**
(9) Knapp (6) minker lysstyrken og knapp (7) øker den. Valgt lysstyrke indikeres ved hjelp av indikator (9). Lysstyrken kan reguleres mellom 30 og 100 %
For å aktivere "backLite" modus (5%), må knapp (6) trykkes en gang til etter å valgt minimum lysstyrke.

Veggpanel

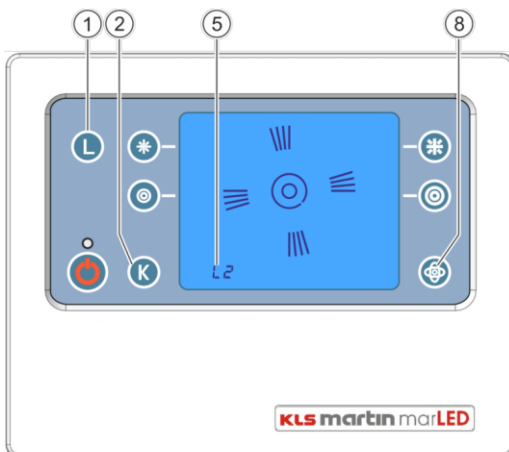


Lysstyrke og lysfelt betjenes på samme måte som på lampen, indikeres med streker for lysstyrke og sirkler for lysfelt

- 1 **Betjeningsvalg**
Valg av lampe L1, L2 eller begge indikator 5
- 2 **Fargetemperatur**
- 8 **Ingen funksjon**

[Skriv inn tekst]

Bruk av sterilt håndtak (sensoGrip) for lyskontroll

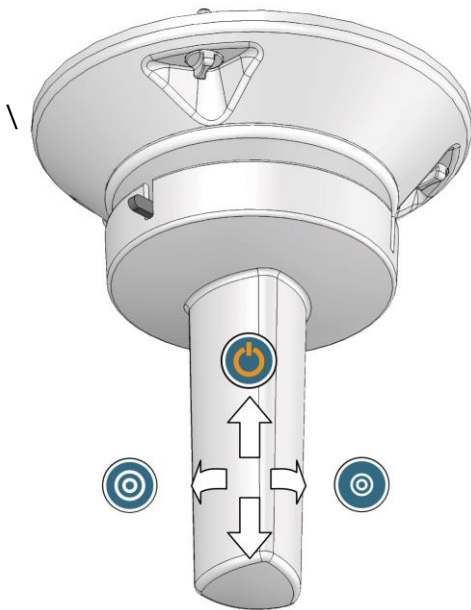

SensoGrip er en multifunksjonell hendel med microbrytere som aktiveres både ved rotasjon og ved opp/ned bevegelser.

Aktiveres ved hjelp av dobbelklikk, høyre eller venstre

- Lysfeltjustering (sett fra brukerside).
 - Roter håndtaket mot **venstre** øker lysfeltet
 - Roter håndtaket mot **høyre** minsker lysfeltet.
- Slå lyset på / av
 - Skyv hendelen **opp** 5 sekund slår lyset på eller av.
- Trekk hendelen **ned** har ingen funksjon.