

ACTIV.A.C. - Hurtigguide for helsepersonell



ACTIV.A.C.™
THERAPY SYSTEM

Ønsker du mer informasjon?

Tlf. 67 02 43 00
kundeservice.no@mediq.com
www.mediqnorge.no

OPPSTARTSBILDE - PASIENTMODUS

1



- For å komme til behandlingsinnstillingene - trykk på spørsmåltegnet og velg så Modus for helsepersonell
- Skjermlås - slå på skjermlåsen for å unngå utilsiktede endringer av innstillingene

MODUS FOR HELSEPERSONELL


2



- Bare autorisert helsepersonell skal ha tilgang til modus for helsepersonell. Velg Avbryt hvis du ikke har autorisasjon.
- Hold OK nede i minst fem sekunder for å gå videre til modus for helsepersonell.
- Trykk på Avbryt for å returnere til det aktuelle Hjelp-meny-skjermbildet.

MODUS FOR HELSEPERSONELL

3

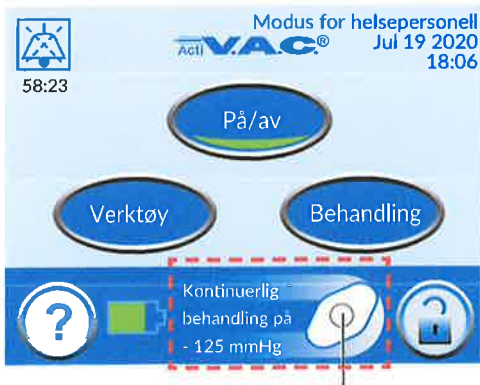

Pumpe i drift viser roterende ikon og de aktive innstillingene.

INNSTILLINGER - VELG BEHANDLING

4



ActiV.A.C. - Hurtigguide for helsepersonell

INNSTILLINGER

5



Under innstillinger kan man justere **Trykk**, **Intensitet** og velge mellom **Kontinuerlig** og **Intermitterende**. Knapper med grønt felt viser aktive innstillinger.

INNSTILLINGER - TRYKK

6



Trykk justeres opp/ned med -25mmHg, intervall mellom -25mmHg til -200mmHg. Alle endringer foretatt vises i ett oversiktsbilde og må bekreftes. NB! Avslått pumpe vil starte på nytt med siste valgte innstillinger! Anbefalt standard undertrykk er -125mmHg.

DE VANLIGSTE VARSLER OG ALARMER

7

Varsel for lavt batterinivå

Beholder ikke koblet til

Kritisk lavt batterinivå

Blokkeringsvarsel

Lekkasjealarm

Behandling inaktiv

Beholder full
Behandling avbrutt



Trykk på **Lydpause** for å dempe varsellyden. Varsellyden kommer tilbake etter to minutter hvis varsel-/alarmforholdet ikke er utbedret.



Trykk på spørsmåltegnet hvis du vil ha mer informasjon om varselet eller alarmen.

SensaT.R.A.C™ med EASYCLEAR PURGE™ Technology


8

- Er konstruert for å opprettholde trykkinnstillingene i såret
- Har en separat stor midtre lumen for å fjerne sårveske
- Opprettholder og overvåker trykk i såret gjennom fire ytre lumen
- Tvinger regelmessig luft inn gjennom de fire ytre lumen samtidig med et sugestøt i midtre lumen, for å bidra til å forebygge og fjerne blokkeringer
- Hjelper til med å fjerne væske fra de ytre lumen for opprettholde evnen til å registrere undertrykket. Hindrer dermed blokkering i alle lumen, og opprettholder evnen til å overvåke trykket i såret



SensaT.R.A.C™-slangen fjerner effektivt sårveske fra såret og overvåker måltrykket

9

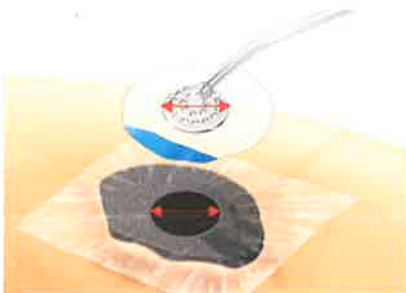

Viktig at hull i drape klippes like stort som plastkrans i pad for at SENSAT.R.A.C. skal fungere optimalt, og forebygge unødvendige alarmer.

SKIFTE AV BEHOLDER

10

