

Strømuttak

Berøringsskjerm


Beholder

Av/på-knapp



Hurtigveiledning
for
behandlingsystem

Skjermmodus
Gjeldende dato
Gjeldende
klokkeslett

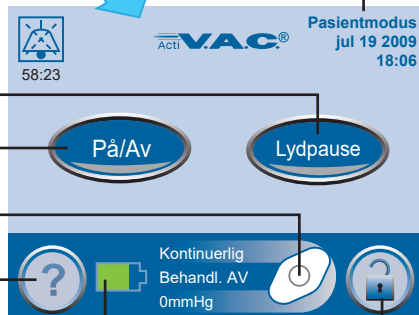

Dempe varselyd

Behandling **av/på**

Roterende ikon = Undertrykk er aktivt

Hjelp

Batterinivå

Skjermlås

Før du tar i bruk ActiV.A.C.®- behandlingsapparatet

Gjennomgå denne hurtigveiledningen. Denne veiledningen skal oppbevares i lommen på behandlingsapparatets bæreseske.

Gjennomgå brukerhåndboken med legen eller sykepleieren din.

Gjennomgå sikkerhetsdatabladet med legen eller sykepleieren din. Dette databladet skal også oppbevares i lommen på behandlingsapparatets bæreseske.

Se i brukerhåndboken under Vanlige spørsmål om ActiV.A.C.®-behandlingsapparatet.

Hvis det oppstår et nødtilfelle, må du kontakte legen din eller ringe ditt lokale nødnummer.

Starte V.A.C.®-behandling



Trykk på og hold inne av/på-knappen i ca. to sekunder for å slå behandlingsapparatet av eller på



Trykk for å starte eller stoppe behandlingen

Grønn = på, grå = av

Fjerne beholderen



Trykk inn låsutførelsen på beholderen

Dra beholderen direkte vekk fra behandlingsapparatet

Montere beholderen



Skyv beholderen over låseskinnen.

Du må ikke vri eller snu beholderen.

Trykk beholderen hardt ned på behandlingsapparatet til du hører et knepp.

Varsler og alarmer

Du finner mer informasjon i brukerhåndboken.



Alle varemerker som nevnes her, tilhører KCI Licensing, Inc., deres datterselskaper og/eller lisensgivere. ©2012 KCI Licensing, Inc. Med enerett. 340091-NO Rev A 9/2012



Kontakt Mediqs kundeservice for mer informasjon:

Tlf. 67 02 43 00 - kundeservice.no@mediq.com - www.mediqorge.no