

## Skjema for renhold av utstyr i tapping og produksjon, og temperaturavlesning, utført av bioingeniør, Blodbanken SSA

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

**II.MSK.Lab SSA.BB.2.1.1-2**

Godkjent dato:

**30.10.2024**

Gyldig til:

**30.10.2027**

Dato endret:

**30.10.2024**

Revisjon:

**11.00**

Medisinsk serviceklinikk/Laboratorieavdelingen SSA/Blodbanken SSA/Pasienter og brukere/Bruk og vedlikehold av lokaler og utstyr.

DISTRIBUSJONSLISTE: EK, perm på produksjon for renhold, kontroller og vedlikehold.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Endret fra Lundair "frysebad" til "innfrysingsenhet", endret layout.

Utstyr	Utførelse, onsdag	Dato/ sign:	Dato/ sign:	Dato/ sign:	Dato/ sign:
Håndsveiser og sterilsveis	Koble fra strømmen. Vask sveisehode på håndveis og sveisespor på sterilsveis med vann og 75 % desinfeksjonssprit, bruk Q-tips. Vask hoveddel, håndveis og sterilsveis utvendig med engangs vaskeklut.				
Strippetenger	Vaskes med engangs vaskeklut. Tørk håndtakene over med engangs spritklut (75%), unngå sprit på valsene.				
MPS 1&2	Utvendige flater og glassplatene vaskes med engangs vaskeklut.				
Hettich sentrifuger	Vask og smør ifølge egen prosedyre for sentrifugen. <b>PS!</b> Bruk veldig lite fett ved smøring.				
Lundair innfrysingsenhet	Vask utvendig/innvendig med engangs vaskeklut og engangs spritklut (75%). Ved behov: Tøm beholder for smeltevann og rengjøres med Virkon, se bruk og vedlikehold av Lundair innfrysingsenhet-prosedyre.				
Balansevekt og veiebord	Vaskes med engangs vaskeklut og engangs spritklut (75%).				
Avlastnings-bord (står i gangen ved døra inn til sentrifugerom)	Vaskes med engangs vaskeklut og engangs spritklut (75%).				
Metallbord og -tralle for blodposer	Vaskes med engangs vaskeklut og engangs spritklut (75%).				
Lokk til fryser	Vaskes med engangs vaskeklut og engangs spritklut (75%).				
Trombocyt-inkubator x 2 (fritt lager og karantene)	Vask overflate, hyller og deksel med engangs vaskeklut og engangs spritklut (75%).				
Tapperom	Slå av og start opp PC v/skranka. Vask og sprit kyvetteholder og HemoCue-apparat utvendig, og topp-plate HemoCue-tralle. Nytt benkepapir etter vask.				
Temperatur avlesing av TESTO. Blodposelager i kjeller C-fløy	Avles TESTO i lager for blodposer i kjeller iht. <a href="#">Temperaturavlesning, blodposelager, Blodbanken SSA</a> . <b>NB! Pass på at ikke varme fra hendene påvirker temperaturmålingen!</b>				

Vurdering ved manglende signatur, dato/sign: \_\_\_\_\_

DokumentID:D00326

Utarbeidet av: <b>Fagbioingeniør Tapping og produksjon</b>	Fagansvarlig: <b>Fagbioingeniør Tapping og produksjon</b>	Godkjent av: <b>Siri Brømnes</b>	Verifisert av: <b>24.10.2024 - Kvalitetskoordinator Elin Hallheim Reiersøl</b>
---	--	-------------------------------------	---