

Sjekkliste - arbeidsoppgaver Produksjon, Blodbanken SSA

Dokumentplassering:

II.MSK.Lab SSA.BB.2.3.2-1

Godkjent dato:

01.03.2022

Gyldig til:

01.03.2025

Dato endret:

29.04.2024

Revisjon:

13.20

Medisinsk serviceklinikk/Laboratorieavdelingen SSA/Blodbanken SSA/Pasienter og brukere/Produksjon av blodprodukter

DISTRIBUSJONSLISTE: EK, skjema under utfylling – på vegg produksjonsrom

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Lagt til at det skal tas utskrift m/sign av flow svar.

Daglige/ukentlige oppgaver. År: Måned: Signer alltid i feltene både når oppgaven utføres eller vurdert til ikke aktuelt.

Dato:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Daglig															
Vask og sprit benker, trillebord og vekt															
Vaske og sprite kurver og kjøleplater brukt til lagring av blod over natten.															
Sjekk på tavle om det er noen merknader/beskjeder															
Ta ut lagerliste trc: P382, E6736/37/38/40/41/42. Sjekk at den stemmer med det som ligger på vippene, ev rydd opp. (Obs; mangler frigjøring?)															
Før 12.00 P790, testsvar Miclis. P705, frigi blod og trc- kons, rydd i brevordner (husk å frigjøre ferdig produserte trc fra dagen før)															
Ca 15.00 samme som «Før 12.00» Husk sammensveisede trc-kons u/aggr. Kan blodprodukter ikke frigis, oppgi årsak.															
Hente og registrere svar fra Bactec FX i BBkvaliSys. Står i perm i skap på prøvefordeling.															
Trc.kons.: Utfør pH og swirling dagen etter utløp. Antall: alle, men kun ett pr tappenummer. Utdater ev det andre kons. også På kjøll: legg kjøleplatene som er "klare til bruk" i hylle for dette															
Rydd ut sentrifugekopper og blå sakser til vaskerommet. Benkene skal være ryddet ved arbeidsdagens slutt.															
Produktkontroller															
Erytrocyttkonsentrat: Kontroll av Hb og Hct. Antall: 1. Hver mandag															
Erytrocyttkonsentrat: Kontroll av LPK, flowcytometri. Antall: 3, tappet man/tirs. Tirsdag: Sjekk kjøll. 13 for prøver til forsendelse!															
Trombocytikkonsentrat: Kontroll av LPK, flowcytometri. Antall: Alle som er tappet mandag og tirsdag. Forsendelse tirs og ons.															
Erytrocyttkonsentrat: Utfør % -hemolyse ved utdatering. Min. 2 stk 2 torsd/mnd (minst 4 pr mnd). Tas max 7 dg før, og 12 t etter utløp.															
Mandag:															
Lage ny virkon															
Fredag:															
Ta utskrift av flow svar på trc- og ery-kons. fra Unilab. Reg. i BBkvaliSys, signer på utskrift, arkiver i merket brevhylle. Tidsrom: mandag til fredag															

Vurdering ved manglende signatur, dato/sign: _____

DokumentID:D00808

Utarbeidet av: Fagbioingeniør Katrine Flaath-Hansen	Fagansvarlig: Fagbioingeniør Tapping og produksjon	Godkjent av: Enhetsleder Synnøve Næsse	Verifisert av: 01.03.2022 - Kvalitetskoordinator Vivi Eide Bengtson
---	--	--	---

Dokumentplassering:
 II.MSK.Lab SSA.BB.2.3.2-1

 Utarbeidet av:
 Fagbioingeniør Katrine Flaath-Hansen

 Fagansvarlig:
 Fagbioingeniør Tapping og produksjon

 Godkjent dato:
 01.03.2022

 Godkjent av:
 Enhetsleder Synnøve Næsse

 Revisjon:
 13.20

Medisinsk serviceklinikk/Laboratorieavdelingen SSA/Blodbanken SSA/Pasienter og brukere/Produksjon av blodprodukter

Daglige/ukentlige oppgaver. År: Måned: Signer alltid i feltene både når oppgaven utføres eller vurdert til ikke aktuelt.

Dato:	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Daglig																
Vask og sprit benker, trillebord og vekt																
Vaske og sprite kurver og kjøleplater brukt til lagring av blod over natten.																
Sjekk på tavle om det er noen merknader/beskjeder																
Ta ut lagerliste trc: P382, E6736/37/38/40/41/42. Sjekk at den stemmer med det som ligger på vippene, ev rydd opp. (Obs; mangler frigjøring?)																
Før 12.00 P790, testsvar Miclis. P705, frigi blod og trc- kons, rydd i brevordner (husk å frigjøre ferdig produserte trc fra dagen før)																
Ca 15.00 samme som «Før 12.00» Husk sammensveide trc-kons u/aggr. Kan blodprodukter ikke frigis, oppgi årsak.																
Hente og registrere svar fra Bactec FX i BBKvaliSys. Står i perm i skap på prøvefordeling.																
Trc.kons.: Utfør pH og swirling dagen etter utløp. Antall: alle, men kun ett pr tappenummer. Utdater ev det andre kons. også																
På kjøp: legg kjøleplatene som er "klare til bruk" i hylle for dette																
Rydd ut sentrifugekopper og blå sakser til vaskerommet. Benkene skal være ryddet ved arbeidsdagens slutt.																
Produktkontroller																
Erytrocyttkonsentrat: Kontroll av Hb og Hct. Antall:1. Hver mandag																
Erytrocyttkonsentrat: Kontroll av LPK, flowcytometri. Antall: 3, tappet man/tirs. Tirsdag: Sjekk kjøp. 13 for prøver til forsendelse!																
Trombocyttkonsentrat: Kontroll av LPK (flowcytometri) Antall: Alle som er tappet mandag og tirsdag. Forsendelse tirs og ons.																
Erytrocyttkonsentrat: Utfør % -hemolyse ved utdatering. Min. 2 stk 2 torsd/mnd (minst 4 pr mnd). Tas max 7 dg før, og 12 t etter utløp.																
Mandag																
Lage ny virkon																
Fredag:																
Ta utskrift av flow svar på trc- og ery-kons. fra Unilab. Reg. i BBKvaliSys, signer på utskrift, arkiver i merket brevhylle. Tidsrom: mandag til fredag																

Vurdering ved manglende signatur, dato/sign: _____