

		Medisinsk serviceklinikk		Prosedyre	
Rengjøring av makrobord, Makro, Histologisk enhet, Avd. for patologi, SSK				Side 1 av 1	
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.3.1.1-10		Godkjent dato: 16.06.2023	Gyldig til: 16.06.2025	Dato endret: 16.06.2023	Revisjon: 15.02

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Histologisk enhet/Makro

DISTRIBUSJONSLISTE: EK

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 16.06.2025 uten endringer i dokumentet.

Omfang

Denne prosedyre gjelder for bioingeniører, spesialbioingeniører og obduksjonspreparanter, histologisk enhet.

Hensikt

Beskrive hvordan makrobordet skal rengjøres etter makrobeskjæring.

Handling

1. Brukt engangsutstyr kastes.
2. Brukt skalpellblad kastes i gul boks.

3. Lillemakro:

Hver dag: Makrobenkene vaskes med vann/sprit/såpe (etter behov) og tørkes av «uttaker» selv.

En gang i uken: Vask makrobenkene og instrumentene i 1% Virkonløsning av «uttaker» selv (Se beskrivelse på Virkonboksen).

Stormakro:

Hver dag:)

- Makrobenker og brukt utstyr vaskes med vann/sprit/såpe (etter behov) og tørkes av uttaker:
- Utstyret legges tilbake på skjæreplaten av uttaker
- Spesialbioingeniørene (ved fravær Makro 1 eller andre fra lillemakro) sjekker at det er nok forbruksmateriell og nødvendig utstyr på plass til neste dag. Sjekk også om noen av søplene må tømmes.

Hver mandag (evt. annen dag ved fravær): Utføres av spesialbioingeniør:

- Makrobenkene vaskes grundig med sprit/såpe og brukt utstyr vaskes i oppvaskmaskinen eller i bøtte med 1% Virkonløsning.
- De perforerte ristene i vaskene tas opp og vaskekummene renses og vaskes med såpe.
- Fyll på papir, hansker, tusj, knivblader, sur formalin, sprit, formalin, lymfeknutevæske og annet nødvendig forbruksmateriell.

DokumentID:D01874

Utarbeidet av: Fagbioingeniør Linda Merete Lie Røgeberg	Fagansvarlig: Linda Merete Lie Røgeberg	Godkjent av: Avdelingsjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Verifisert av: 25.06.2021 - Linda Kvelland Skaara
---	---	---	---