

Fiksering av cytologiske prøver, Cytologisk og histologisk diagnostikk. Avd. for patologi SSK

Side 1 av 2

Dokumentplassering:

II.MSK.Pat.2.2.1-5

Godkjent dato:

20.08.2024

Gyldig til:

20.08.2026

Dato endret:

20.08.2024

Revisjon:

9.00

Medisinsk serviceklinikk\Avd for patologi SSK\Pasienter og brukere\Cytologisk og histologisk diagnostikk\Cytologisk laboratorium

DISTRIBUSJONSLISTE: EK.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Endret navn på arbeidssted

<i>Omfang</i>	Denne prosedyre gjelder for bioingeniører, cytologisk og histologisk diagnostikk.
<i>Bakgrunn</i>	Hensikten med denne prosedyre er å sørge for riktig fiksering av cytologisk prøvemateriale.
<i>Akkreditert?</i>	Ja.
<i>Prinsipp</i>	Cellene alkoholfikseres for å hindre uttørking og degenerasjon.
<i>Ytelse</i>	Ikke relevant.
<i>Sikkerhet</i>	Arbeid i avtrekk.
<i>Prøvemateriale</i>	Cytologiske utstryk.
<i>Undersøkelse</i>	Mikroskopisk undersøkelse av cytologiske prøver.
<i>Forsendelse</i>	Forsendelseshylser.
<i>Oppbevaring og prøvepreparering</i>	Væskeprøver oppbevares i kjøleskap før preparering.
<i>Utstyr, kalibrering</i>	Ikke relevant
<i>Interferens/kryssreaksjoner og andre feilkilder</i>	Ikke relevant
<i>Reagenser, slå sammen</i>	Fikseringsspray, Cytofix Aerosol RAL, nr. 361300, Chemi Teknik. Alkohol, Arcus.
<i>Tillaging av reagenser</i>	Ikke relevant
<i>Kontrollmateriale</i>	Ikke relevant
<i>Utførelse</i>	<p>Fiksering av utstryk. 1-2 trykk med fikseringsspray fra ca 20 cm avstand.</p> <p>Fiksering av væsker Prøvematerialet blandes med 50 % alkohol i forhold 1:1 eller 1 del 70% alkohol blandes med 2 deler prøvemateriale (1:2)</p>
<i>Evaluering av resultat/Vurdering av kontroller</i>	Mikroskopisk vurdering.
<i>Usikkerhet</i>	For lang tid mellom utstryk og fiksering.
<i>Avfallshåndtering</i>	Ikke relevant
<i>Validering/dokumentasjon/referanser</i>	Metoden har validert seg selv gjennom lang tids bruk.

Kryssreferanser:
Eksterne referanser:

DokumentID:D01884

Utarbeidet av: Fagbioingeniør Grete von der Ohe	Fagansvarlig: Grete von der Ohe	Godkjent av: Avdelingsjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Verifisert av: 14.08.2024 - Linda Kvelland Skaara
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.2.1-5	Utarbeidet av: Fagbioingeniør Grete von der Ohe	Fagansvarlig: Grete von der Ohe	Godkjent dato: 20.08.2024	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Revisjon: 9.00
-------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------

Medisinsk serviceklinikk\Avd for patologi SSK\Pasienter og brukere\Cytologisk og histologisk diagnostikk\Cytologisk laboratorium