

		<b>Medisinsk serviceklinikk</b>		<b>Prosedyre</b>	
<b>Innstilling av sentrifugene, Cytologisk og histologisk diagnostikk. Avd. for patologi SSK</b>				Side 1 av 1	
Dokumentplassering: <b>II.MSK.Pat.2.2.1-7</b>		Godkjent dato: <b>20.08.2024</b>	Gyldig til: <b>20.08.2026</b>	Dato endret: <b>20.08.2024</b>	Revisjon: <b>8.00</b>

Medisinsk serviceklinikk\Avd for patologi SSK\Pasienter og brukere\Cytologisk og histologisk diagnostikk\Cytologisk laboratorium

DISTRIBUSJONSLISTE: EK.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: endret arbeidssted

## Omfang

Denne prosedyre gjelder for bioingeniører, cytologisk og histologisk diagnostikk.

## Hensikt

Hensikten med denne prosedyre er å sørge for riktig bruk av sentrifugene.

## Handling

### Hovedsentrifuge

For cytologiske prøver:

Program 1: 10 minutter på 2000 RPM.

Molpat:

Program 2.

Medisinsk teknisk avdeling har programmert sentrifugen.

Ved evt endringer se manualen.

### Cytospin

For alle cytologiske prøver unntatt spinalvæske brukes program 8: 6 minutter på 1500 RPM.

For spinalvæske brukes program 5: 3 minutter på 1000 RPM.

1. Skru på hovedbryter.
2. Trykk på «load», deretter velges program ved å trykke 1-9.  
Dersom man må forandre på tiden og/eller omdr. (RPM) må man først trykke «set time» deretter ant minutter og «enter» og/eller «set speed» og deretter ant. omdr. og «enter».
3. Trykk «enter» for å lagre programmet.
4. Trykk «start».
5. For å åpne lokket trykk «open lid».

DokumentID:D01886

Utarbeidet av: <b>Fagbioingeniør Anita Vasland</b>	Fagansvarlig: <b>Grete von der Ohe</b>	Godkjent av: <b>Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen</b>	Verifisert av: <b>14.08.2024 - Linda Kvelland Skaara</b>
---	---	--	---