

Laboratorierenhold, Enhet for cytologi, Avd. for patologi SSK

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

II.MSK.Pat.2.2.1-8

Godkjent dato:

20.08.2024

Gyldig til:

20.08.2026

Dato endret:

20.08.2024

Revisjon:

9.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Cytologisk og histologisk diagnostikk/Cytologisk laboratorium

DISTRIBUSJONSLISTE: EK.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Endret arbeidssted

Omfang

Denne prosedyre gjelder for bioingeniører, cytologisk og histologisk diagnostikk.

Hensikt

Denne prosedyre beskriver rutiner for rengjøring av div. utstyr på cytologisk laboratorium.

Handling

Utstyr til sentrifugering

Bruk fortrinnsvis plastrør med skrukork (30 ml) til sentrifugering.

Cytospin-beholdere vaskes i oppvaskmaskin.

Utstyr til prøvebehandling

Bruk rent papir / filterpapir oppå benken, dette papiret kastes etter bruk/ tilsmussing.

Prøveglass åpnes under avtrekk og klargjøres der for utstryk/ sentrifugering.

Utstrykene sorteres på papir som kastes etter bruk.

Daglig renhold

Fargeskåler:

Skyll ut av fargeskålene med vann. Vask i oppvaskmaskin.

Utslagsvask:

Utslagsvask og tilhørende benkeplate blir brukt til preparering av biologisk materiale og skal vaskes med Virkon etter bruk.

Ukentlig renhold

Vask benker og andre flater med såpevann og sprit siste dag i hver lab.uke.

Bytt til nytt benkepapir der det brukes.

Månedlig renhold

Sentrifuger: I begynnelsen av hver måned skal sentrifugene rengjøres med 70% sprit, både innvendig og utvendig.

Skålene til prøveinnsatsene i hovedsentrifugen tas ut og vaskes med Virkon. Skyll grundig med vann etter at virketiden er over.

Kryssreferanser

Eksterne referanser

DokumentID:D01889

Utarbeidet av: Fagbioingeniør Anita Vasland	Fagansvarlig: Grete von der Ohe	Godkjent av: Avdelingsjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Verifisert av: 14.08.2024 - Linda Kvelland Skaara
---	---	---	---