

Fjerne dekkglass/plastfilm, Cytologisk og histologisk diagnostikk. Avd. for patologi SSK

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

II.MSK.Pat.2.2.1-13

Godkjent dato:

20.08.2024

Gyldig til:

20.08.2026

Dato endret:

20.08.2024

Revisjon:

9.00

Medisinsk serviceklinikk\Avd for patologi SSK\Pasienter og brukere\Cytologisk og histologisk diagnostikk\Cytologisk laboratorium

DISTRIBUSJONSliste: EK.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Endret arbeidssted

Omfang

Denne prosedyre gjelder for bioingeniører, cytologisk og histologisk diagnostikk.

Hensikt

Prosedyren beskriver hvordan dekkglass eller plastfilm kan fjernes.

Handling**Fjerning av dekkglass:**

Plasser prøveglasset i xylen til dekkglasset løsner.

Fjerning av plastfilm:

Plasser prøveglasset 2 minutter i aceton.

Fjern «gelemassen» og sett prøveglasset i xylen.

Dekk på nytt og sett på ny etikett med prøvenummer.

Utarbeidet av: Fagbioingeniør Anita Vasland	Fagansvarlig: Grete von der Ohe	Godkjent av: Avdelingsjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Verifisert av: 14.08.2024 - Linda Kvelland Skaara
---	---	---	---