

		Medisinsk serviceklinikk		Prosedyre	
Preparering av bronkialskylllevæske, Cytologisk og histologisk diagnostikk, Avd. for patologi SSK.				Side 1 av 2	
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.2.1-14		Godkjent dato: 20.08.2024	Gyldig til: 20.08.2026	Dato endret: 05.09.2024	Revisjon: 13.02

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Cytologisk og histologisk diagnostikk/Cytologisk laboratorium

DISTRIBUSJONSliste: EK, skuff på lab.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet, ingen endring.

Omfang	Denne prosedyre gjelder for bioingeniører, cytologisk og histologisk diagnostikk.
Bakgrunn	Hensikten med denne prosedyre er å sørge for riktig behandling av bronkialskylllevæske.
Akkreditert?	Ja.
Prinsipp	Utstryk av bronkialskylllevæske.
Ytelse	Ikke relevant.
Sikkerhet	Arbeid i avtrekk.
Prøvemateriale	Bronkialskylllevæske.
Undersøkelse	Mikroskopisk undersøkelse av bronkialskylllevæske.
Forsendelse	Sendes ufiksert i forsendeshylse.
Oppbevaring og prøvepreparering	Oppbevares i kjøleskap før preparering.
Utstyr, kalibrering	Sentrifuge.
Interferens/kryssreaksjoner og andre feilkilder	Ikke relevant.
Reagenser, slå sammen	Fikseringsspray; Cytofix Aerosol RAL, 361300, Chemi Teknik AS
Tillaging av reagenser	Ikke relevant.
Kontrollmateriale	Ikke relevant.
Utførelse	<p>Registrer prøven.</p> <p>Det skal lages 2 direkte utstykk som skal farges på PAP. Objektglassene merkes med klisterlapper med prøvenr og PAP.</p> <p>Sentrifuger væsken i hovedsentrifuge, 10 minutter ved 2000 RPM.</p> <p>Pipetter av supernatanten.</p> <p>Lag direkte utstryk av bunnfallet ved å stryke ut 1 dråpe av bunnfallet mellom 2 objektglass.</p> <p>Fikser utstrykene straks med fikseringsspray.</p> <p>Lagre restmaterialet ufiksert i kjøleskap til prøven er besvart og godkjent.</p>
Evaluerings av resultat/ Vurdering av kontroller	Fargekvalitet vurderes daglig.
Usikkerhet	Ikke relevant.
Avfallshåndtering	Generelle avfallsrutiner følges.
Validering/dokumentasjon/referanser	Metoden har validert seg selv etter lang tids bruk.

Kryssreferanser:

[II.MSK.Pat.2.2.1-7](#)


[Innstilling av sentrifugene, Cytologisk og histologisk diagnostikk. Avd. for patologi SSK](#)

[II.MSK.Pat.2.2.1-10](#)

[Papanicolaou farging, Cytologisk og histologisk diagnostikk. Avd. for patologi SSK](#)

DokumentID:D01903

Utarbeidet av: Fagbioingeniør Grete von der Ohe	Fagansvarlig: Grete von der Ohe	Godkjent av: Avdelingsjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Verifisert av: 14.08.2024 - Linda Kvelland Skaara
---	---	---	---

 SØRLANDET SYKEHUS	Preparering av bronkialskyllvæske, Cytologisk og histologisk diagnostikk, Avd. for patologi SSK.				Side: 2 Av: 2
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.2.1-14	Utarbeidet av: Fagbioingeniør Grete von der Ohe	Fagansvarlig: Grete von der Ohe	Godkjent dato: 20.08.2024	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Revisjon: 13.02

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Cytologisk og histologisk diagnostikk/Cytologisk laboratorium

[II.MSK.Pat.2.2.1-18](#)

[Mottak og registrering av kliniske prøver, Cytologisk og histologisk diagnostikk, Avd. for patologi SSK](#)

Eksterne referanser: