

		Medisinsk serviceklinikk			Prosedyre
Rørpost, Avd. for patologi, SSK					Side 1 av 1
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.1-19		Godkjent dato: 14.06.2024	Gyldig til: 14.06.2026	Dato endret: 14.06.2024	Revisjon: 10.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Fellesprosedyrer/dokumenter

DISTRIBUSJONSLISTE: EK, på rørposten.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Ingen endring, kun ny revidering.

Omfang

Denne prosedyre gjelder for alle ansatte ved Avdeling for patologi.

Hensikt

Beskrive hvordan rørposten skal betjenes.

Handling

For å sende rørpost:

1. Plasser det som skal sendes i patronen som hører til rørposten. Små prøveglass legges i forsendeshylser før det legges i patronen. Beskytt prøven med kluter i begge ender.
2. Lukk patronen og plasser den på venstre side oppe på maskinen.
3. Slå mottakerens nummer. Trykk «E».

Rørpoststasjoner

Sted:	Adresse:
Akuttmottak 1.etg	1
Eksp. Kvinne/barneklinikk	2
Blodprøvetakning 1.etg	5
Patologisk avd. 1. etg	6
Medisinsk Biokjemi 2. etg	7
Blodbank 2.etg	8
Operasjon 2. etg	9
Senter for kreftbehandling lab	10

4. Når vi har mottatt noe i rørposten må avsenderen få tilbakesendt sin patron.
Ved feil på anlegget, kan vi ringe 3939 eller 8451, etter kl 15.00 (teknisk vakt) tlf 91685108.

DokumentID:D01934

Utarbeidet av: Linda Merete Lie Røgeberg	Fagansvarlig: Linda Merete Lie Røgeberg	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Verifisert av: 13.06.2024 - Linda Kvelland Skaara
--	---	--	---