

Klinisk cytologi, Cytologisk og histologisk diagnostikk. Avd. for patologi, SSK

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

II.MSK.Pat.2.2.2-1

Godkjent dato:

23.01.2024

Gyldig til:

23.01.2026

Dato endret:

14.08.2024

Revisjon:

7.03

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Cytologisk og histologisk diagnostikk/Cyto- og histodiagnostikk

DISTRIBUSJONSLISTE: EK.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Endret tittel i teksten.

Omfang

Denne prosedyre gjelder for bioingeniør på Cytologisk og histologisk diagnostikk.

Hensikt

Retningslinjer for bioingeniører som prediagnostiserer klinisk cytologi.

Handling

- Bruk håndscanner på objektglasset for å hente opp prøven i LVMS.
- Marker funn med tusjmerker på objektglasset.
- Bioingeniør legger inn svarkoder og ev tekst i screeningbildet slik at patolog kan overføre dette til diagnostikkbildet.
- Legg inn riktig hovedansvarlig og ev medansvarlig.
- Ved behov hentes tidligere relevante prøver i arkiv og screenes på nytt.
- Prøve legges i hylla til riktig hovedansvarlig eller medansvarlig lege.

Kryssreferanser

Eksterne referanser

Utarbeidet av: Fagbioingeniør Anita Vasland	Fagansvarlig: Anita Vasland	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Verifisert av: 07.02.2022 - Linda Kvelland Skaara
---	---------------------------------------	--	---