

		Medisinsk serviceklinikk		Prosedyre	
Endometriecytologi, Cytologisk og histologisk diagnostikk. Avd. for patologi, SSK				Side 1 av 1	
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.2.2-2		Godkjent dato: 23.01.2024	Gyldig til: 23.01.2026	Dato endret: 14.08.2024	Revisjon: 6.02

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Cytologisk og histologisk diagnostikk/Cyto- og histodiagnostikk

DISTRIBUSJONSLISTE: EK.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Endret tittel i overskrift og tekst.

Omfang

Denne prosedyre gjelder for bioingeniør på Cytologisk og histologisk diagnostikk.

Hensikt

Retningslinjer for bioingeniører som prediagnostiserer endometrieprøver.

Handling

- Bruk håndscanner på objektglasset for å hente opp prøven i LVMS.
- Endometrieprøven mikroskoperes først med liten forstørrelse (4 x) for å få oversikt over arkitekturen og antall celleflak / -grupper. Deretter mikroskoperes prøvene med 10 x objektiv.
- Marker funn med tusjmerker på objektglasset.
- Bioingeniør legger inn svarkoder og ev tekst i screeningbildet slik at patolog kan overføre dette til diagnostikkbildet.
- Legg inn riktig hovedansvarlig og ev medansvarlig.
- Ved behov hentes tidligere relevante prøver i arkiv og mikroskoperes på nytt.
- Prøve legges i hylla til riktig hovedansvarlig eller medansvarlig lege.

Kryssreferanser

Eksterne referanser

DokumentID:D02026

Utarbeidet av: Fagbioingeniør Anita Vasland	Fagansvarlig: Anita Vasland	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Verifisert av: 07.02.2022 - Linda Kvelland Skaara
---	---------------------------------------	--	---