

		Medisinsk serviceklinikk		Prosedyre	
Overføring av blodprodukt til fritt lager, Blodbanken SSA				Side 1 av 3	
Dokumentplassering: II.MSK.Lab SSA.BB.2.3-7		Godkjent dato: 18.06.2024	Gyldig til: 18.06.2026	Dato endret: 18.06.2024	Revisjon: 10.00

Medisinsk serviceklinikk/Laboratorieavdelingen SSA/Blodbanken SSA/Pasienter og brukere/Produksjon av blodprodukter
 DISTRIBUSJONSliste: EK, prosedyreperm "Forliksbenk" på blodtypeserologi, prosedyreperm på produksjon
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Ingen endring

HENSIKT

Sikre at blodprodukter er testet negativt på alle obligatoriske smittetester, nødvendige blodtypeserologiske analyser er utført, og at øvrige produktkrav er oppfylt før de legges over i fritt lager.

OMFANG

Gjelder bioingeniører sertifisert for frigjøring av blodprodukter.

BAKGRUNN

Det blir utført smittetester iht. [Veileder for transfusjonstjenesten i Norge](#), [Blodforskriften](#) og "Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components".

Blodprodukter som ikke oppfyller alle produktkrav, skal oppbevares i karantene slik at de ikke kan forveksles med frigitte produkter.

AKKREDITERT

Er ikke en akkreditert prosedyre

UTFØRELSE

Overføring av resultat på smittetester til Prosang

Utføres ca. kl. 12 for tester som er sendt MedMik dagen før. Utføres ca. kl. 15 for tester som er sendt MedMik kl 12 samme dag

- Hent over resultater på smittetester fra Miclis til Prosang i P790
- Sjekk brevordner ved PC'en på produksjon om det ligger utskrift av ikke frigitte enheter som skal følges opp. Kast listene etter hvert som enhetene er fulgt opp og frigitt.

Overføring av erythrocyttkonsentrat til fritt lager

- Bruk tralle med kjøleplater og hent erythrocyttkonsentrat fra karanteneskapet
- P705: Skann strekkoden for tappenummer og produktkode fra hvert erythrocyttkonsentrat

Melding «Aktiv bevåkning A84» betyr at enheten er forbeholdt en spesiell pasient

- Forsør meldingen og frigi enheten
- Gå i G000, skann aktuelt tappenummer og sjekk gjeldende koder og tekster for sperring (for eksempel A84, A90, A94, SSK K03, SSA K18).
- Sperr enheten i P347 og legg inn koden(e) og tekst som årsak til sperring. Denne informasjonen, samt tappenummer, skrives på en post-it lapp og festes på blodposen.
- Gi beskjed om tappenummer, obs-koder og tekster, samt at posen er sperret, til koordinator blodtypeserologi.

Koordinator blodtypeserologi

- Sjekk i perm merket «Blodgivere med OBS-kode A84» om aktuell pasient som blodet skal sperres til finnes
 - Hvis posen skal forbli sperret følges [Oppfølging av pasienter med flere antistoffer/ behov for spesialprodukter, Blodbanken SSA](#).

DokumentID:D04895

Utarbeidet av: Enhetsleder Blodbanken	Fagansvarlig: Fagbioingeniører i Blodbanken	Godkjent av: Siri Brømnes	Verifisert av: 18.06.2024 - Kvalitetskoordinator Elin Hallheim Reiersøl
---	---	-------------------------------------	---

 SØRLANDET SYKEHUS	Overføring av blodprodukt til fritt lager, Blodbanken SSA				Side: 2 Av: 3
Dokumentplassering: II.MSK.Lab SSA.BB.2.3-7	Utarbeidet av: Enhetsleder Blodbanken	Fagansvarlig: Fagbioingeniører i Blodbanken	Godkjent dato: 18.06.2024	Godkjent av: Siri Brømnes	Revisjon: 10.00

Medisinsk serviceklinikk/Laboratorieavdelingen SSA/Blodbanken SSA/Pasienter og brukere/Produksjon av blodprodukter

- Ev. slett OBS-kode hvis ikke lenger aktuelt. Konferer med fagbioingeniør distribusjon av blodprodukter ved tvil.

Kan enheten ikke frigjøres vises en melding på skjermen.

- Velg Informasjon, det vises en oversikt over hvilke analyser som er utført/mangler på det aktuelle tappenummer
- Meldingen «Enheten er ikke blodtypet» kan skyldes
 - Ikke utført ABO/RhD-typing, sjekk P000
 - Ikke utført ABD-typing (confirm), sjekk BLG i P711
 - Avventer medisinsk bedømming, sjekk G000
- Kvitter i Prosang for at enheten «er tatt bort»
- Hvis det mangler analyser, gi beskjed til blodtypeserologi
- Kontakt ev. fagbioingeniør/blodgiverkonsulent for å avklare om enheten kan frigjøres

Plassering av enheter og arkivering av utskrifter

- Rydd på plass alle frigitte enheter i fritt lager
 - Legg i riktig hylle etter blodtype og i riktig rekkefølge etter tappenummer/utløpsdato.
 - Vær oppmerksom på at ORhD(neg) K(pos) legges i egen hylle.
 - Hvis det er poser som ikke er helt kalde må disse om mulig legges enkeltvis ved siden av hverandre.
- Legg alle ikke frigitte enheter tilbake i karanteneskapet
 - Noter på utskrift fra Prosang hva som er årsak til at den ikke kan frigis,
 - Legg utskriften i brevordner ved PC'en på produksjon for oppfølging, kast utskriften når enheten(e) er frigitt
- Enheter som er **sperrert i P347** legges i øverste skuff merket «forbeholdt bestemte pasienter, sperret i P347» på kjølerom.

Overføring av Trombocyttkonsentrat til fritt lager

- Ta aktuelle trombocyttkonsentrat fra karanteneinkubatoren på sentrifugerom
- P705: Skann strekkoden for tappenummer og produktkode fra hvert trombocyttkonsentrat
- Legg frigitte enheter i hyller merket «fritt lager» i trombocyttkubatoren på svalrom.

Kan enheten ikke frigjøres, vises en melding på skjermen

- Følg samme punkter som under erytrocyttkonsentrat

Sammensveisede trombocyttkonsentrat

Konsentratene er produsert i P700, det er ikke tatt prøve til produktkontroll.

- Konsentrater uten aggregater kan frigjøres i P705 og legges i hylle merket «Frigitt, men ikke tatt produktkontroll» i karanteneskap. Behold samlet slangestuss og lukkede klemmer.
- Konsentrater med aggregater skal ikke frigjøres, legges i hylle «Ikke frigjort» i karanteneskap. Behold samlet slangestuss og lukkede klemmer.

Videre håndtering ift akuttutlevering av disse på vakt, se [Valg og utlevering av trombocyttkonsentrat, Blodbanken SSA.](#)

Frigjøring av plasma

Se [Pakking og salg av plasma til fraksjonering. Blodbanken SSA](#)

Kryssreferanser

 SØRLANDET SYKEHUS	Overføring av blodprodukt til fritt lager, Blodbanken SSA				Side: 3 Av: 3
Dokumentplassering: II.MSK.Lab SSA.BB.2.3-7	Utarbeidet av: Enhetsleder Blodbanken	Fagansvarlig: Fagbioingeniører i Blodbanken	Godkjent dato: 18.06.2024	Godkjent av: Siri Brømnes	Revisjon: 10.00

Medisinsk serviceklinikk/Laboratorieavdelingen SSA/Blodbanken SSA/Pasienter og brukere/Produksjon av blodprodukter

[II.MSK.FEL.LAB](#)
[FEL.IMTRA FEL.4.2-16](#)

[Valg og utlevering av trombocyttkonsentrat, Blodbankene SSHF](#)

[II.MSK.Lab](#)
[SSA.BB.2.1-5](#)

[Bruk, kontroll og vedlikehold av slangesveis med håndtak. Blodbanken SSA](#)

[II.MSK.Lab](#)
[SSA.BB.2.4.3-8](#)

[Oppfølging av pasienter med flere antistoffer/ behov for spesialprodukter, Blodbanken SSA](#)

[II.MSK.Lab](#)
[SSA.BB.2.4.6-3](#)

[Pakking og salg av plasma til fraksjonering. Blodbanken SSA](#)

Eksterne referanser

[13.6 Veileder for transfusjonstjenesten i Norge](#)
[2.12 Blodforskriften](#)