

		<b>Somatikk Arendal</b>		<b>Prosedyre</b>	
<b>STERILISERING VED BRUK AV VANNDAMPAUTOKLAVE - STERILSENTRALEN - SSA</b>				Side 1 av 2	
Dokument ID: <b>II.SOA.AIO.STER.5-9</b>		Godkjent dato: <b>08.11.2024</b>	Gyldig til: <b>08.11.2026</b>	Revisjon: <b>12.00</b>	

Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/STERILSENTRAL/Smittevern

## HENSIKT

Sikre sterilt utstyr/instrumenter til alle aseptiske prosedyrer.  
Sterilt = uten liv – mikrober – sporer.

## OMFANG

Personale i sterilsentralen som har fått opplæring i sterilsentralarbeid.

## ANSVAR

Sterilsentralansatte etter spesiell opplæring i sterilisering.

Daglig; den som er oppsatt etter turnus.

Teknisk personell er ansvarlig for vedlikehold av sterilisatorer etter oppsatt skjema og ved melding om avvik fra personale i sterilsentralen.

## UTSTYR

- Rustfrie trådkurver tilpasset utstyret som skal steriliseres.
- Merketang for batchnummer, steriliseringsdato, utløpsdato og sterilisator-identitet.
- Hev og senkbar ladevogn for inn og utlasting av autoklaven.
- Skjema for dokumentering.
- Vanndampsterilisator med display som viser program.

## TILTAK

Ladning, start, kontroll og rydding av sterilisator.

Programmer vi bruker pr. i dag: PROGRAM 10 OG CONTAINER.

- Ladning:
  - Plasser folieposer over containere, varmen fra containeren hjelper med tørking av plasten. Ved mindre foliemengder kan kurven settes øverst.
  - Tungt gods skal ha mellomrom mellom kurvene; plasser for eksempel godset i de dypeste kurvene, det gir da et godt mellomrom.
  - Tre nye containere med grått lokk (side- luftinntak) kan stables oppå hverandre, andre rister skal ha lav kurv og et metall-brett mellom hver container.
  - For å avgjøre mengde utstyr for hver syklus: følg bilder fra siste godkjente validering.
- Start:
  - Vær sikker på at sterilisator er innstilt på rett program.
  - Merking av godset med batchnummer, steriliseringsdato, utløpsdato og sterilisator-identitet.
  - Se at dato og nr. passer overens.
    - Folie/papir kan lagres 1 år.
    - Containere kan lagres ½ år
    - Gods pakket i to-lags emballasje kan lagres i 3 måneder.
  - Lim samme batchnummer-lapp på dokumentasjonsskjema. Legg ved en batch-kontroll.
- Kontroll:

Når programmet er ferdig kjørt se på syklusutskrift; der du leser verdiene. Utskriften kommer automatisk ut etter hver syklus.

  - Noter batchnummer på dokumentasjonsskjema og signer. På nr. 1 og 2 signer og godkjenn i dataprogram.

Utarbeidet av: <b>Christin Dimopoulou Thomassen</b>	Fagansvarlig: <b>Anette Dorholt</b>	Godkjent av: <b>Christin Thomassen Dimopoulou</b>	
--	--	--	--

 SØRLANDET SYKEHU	<b>Sterilisering ved bruk av vandampautoklave - Sterilsentralen - SSA</b>				<b>Side: 2</b> <b>Av: 2</b>
	Dokument-id: II.SOA.AIO.STER.5-9	Utarbeidet av: Christin Dimopoulou Thomassen	Fagansvarlig: Anette Dorholt	Godkjent dato: 08.11.2024	Godkjent av: Christin Thomassen Dimopoulou

Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/STERILSENTRAL/Smittevern

- Kjør ut godset på steril side. (Gjelder kun for nr. 1)
  - Se over godset og sjekk om det kan frigis.
  - Fuktighet? Indikatorer har fungert?
  - Fuktige pakker og pakker med oljeflekker betraktes som usterile og må pakkes og kjøres om igjen.
  - La godset/ tralla stå til det er avkjølt.
  - Containere må være helt avkjølt før de flyttes for å unngå kondens inni containeren.
- Rydd sterilisator: ta minst mulig på pakkene, lagre gjerne den samme kurven som godset er autoklavert i på riktig plass i reolsystemet, hvis det lar seg gjøre.
- Sterilisator nr. 2, 3 og 4 har automatisk inn og utlasting. Husk å kontrollere og sette inn batchnummer på dokumentasjonsskjema, syklusutskrift lagres sammen med skjemaet.
- Signer på skjema når godset er frigitt/ryddet.
- Alle avvik i kjøringen dokumenteres på sterilisator-dokumentasjonen for den gjeldende kjøring.

**Litteratur:** «Sterilforsyning i helsetjenesten» - Hauff, Sølsnes og Bergh. Kap. 10  
 Lov om vern mot smittsomme sykdommer.  
 Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner- sykehusinfeksjoner.