
		<b>Bürker tellekammer, Medbio SSK</b>			<b>Side: 2</b> <b>Av: 2</b>
Dokumentplassering: II.MSK.MBio.6.1.3-3	Utarbeidet av: Marianne Walle	Fagansvarlig: Fagbioingeniør Marianne Walle	Godkjent dato: 22.08.2023	Godkjent av: Avdelingssjef Marianne Skomedal	Revisjon: 10.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd for medisinsk biokjemi SSK/Pasient og brukere/Enhet A/Manuell Hematologi

#### A-rute

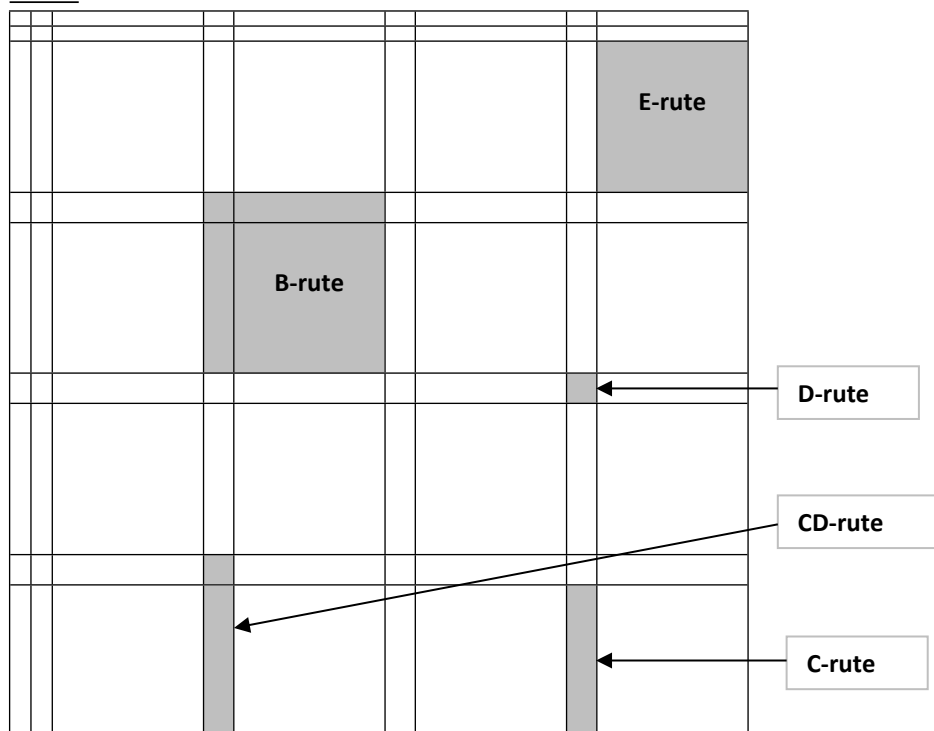

Hver A-rute består av:

- 16 B-ruter
- 16 C-ruter
- 16 D-ruter
- 16 CD-ruter

#### Tellekammerets størrelse og volum

Rute	Størrelse	Volum
A	1 x 1 mm	1/10 mm <sup>3</sup> (µl)
B	0,25 x 0,25 mm	1/160 mm <sup>3</sup> (µl)
C	1/5 x 1/20 mm	1/1000 mm <sup>3</sup> (µl)
D	1/20 x 1/20 mm	1/4000 mm <sup>3</sup> (µl)
E	1/5 x 1/5 mm	1/800 mm <sup>3</sup> (µl)
CD	1/4 x 1/20 mm	1/250 mm <sup>3</sup> (µl)
Hele kammeret	3 x 3 mm	9/10 mm <sup>3</sup> (µl)

#### Lagerplassering

Bürker tellekammer samt dekkglass finnes i skuffeseksjonen under dobbeltmikroskop, Enhet for Automasjon.

#### Vaskerutiner

Tellekammer og dekkglass legges i et kar med vann etter bruk. De vaskes i Virkon i 30 minutter i forbindelse med ukentlige rutiner på arbeidsplassen G11 / Manuell hematologi.

#### Kryssreferanser

- [II.MSK.MBio.6.1.3-4 Innstilling av mikroskop, Medbio SSK](#)
- [II.MSK.MBio.2.1.3.01-3 Trombocytt-telling, manuell, Medbio SSK \(ARKIVERT\)](#)
- [II.MSK.MBio.6.1.3-5 Manuell hematologi, Arbeidsplassbeskrivelse -Medbio SSK](#)

#### Eksterne referanser