

		Klinikknivå		Retningslinje
Trykkvakt-anlegget				Side 1 av 2
Dokument ID: II.SOK.AIO.SSK.2.a-6		Godkjent dato: 20.02.2023	Gyldig til: 20.02.2025	Revisjon: 5.02

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere

NORMAL DRIFT:

Gassforsyning fra sentralgassanlegget. Ventilene V1, V2 og V3 skal stå åpne.

NB! Når ventilen er åpen vil skapdøren kunne lukkes som normalt. Hvis

Vi har Trykkvakt både på Intensiv og Postoperativ


VED SVIKT I OKSYGENTILFØRSEL

- **Steng ventil merket V1, merket med Oksygen**
- **Kople hvit reservegasslange fra oksygenflaske til hurtigkobling C1**
- **Åpne ventil reservegassflaske**
- **Kontroller gassflaskens innholdsmanometer regelmessig. Bytt gassflasken når trykket viser ca 15-20 bar**

VED SVIKT I LUFT-TILFØRSEL

- **Steng ventil merket V3, merket med Luft**
- **Kople sort/hvit reservegasslange fra oksygenflaske til hurtigkobling C3**
- **Åpne ventil reservegassflaske**
- **Kontroller gassflaskens innholdsmanometer regelmessig. Bytt gassflasken når trykket viser ca 15-20 bar**
- **Kontakt teknisk avdeling: mob 91 68 51 08 (døgnvakt)**

Utarbeidet av: Siv Aanestad	Fagansvarlig: Grethe Abusdal	Godkjent av: Avd.leder Grete K. Erdvik	
---------------------------------------	--	--	--

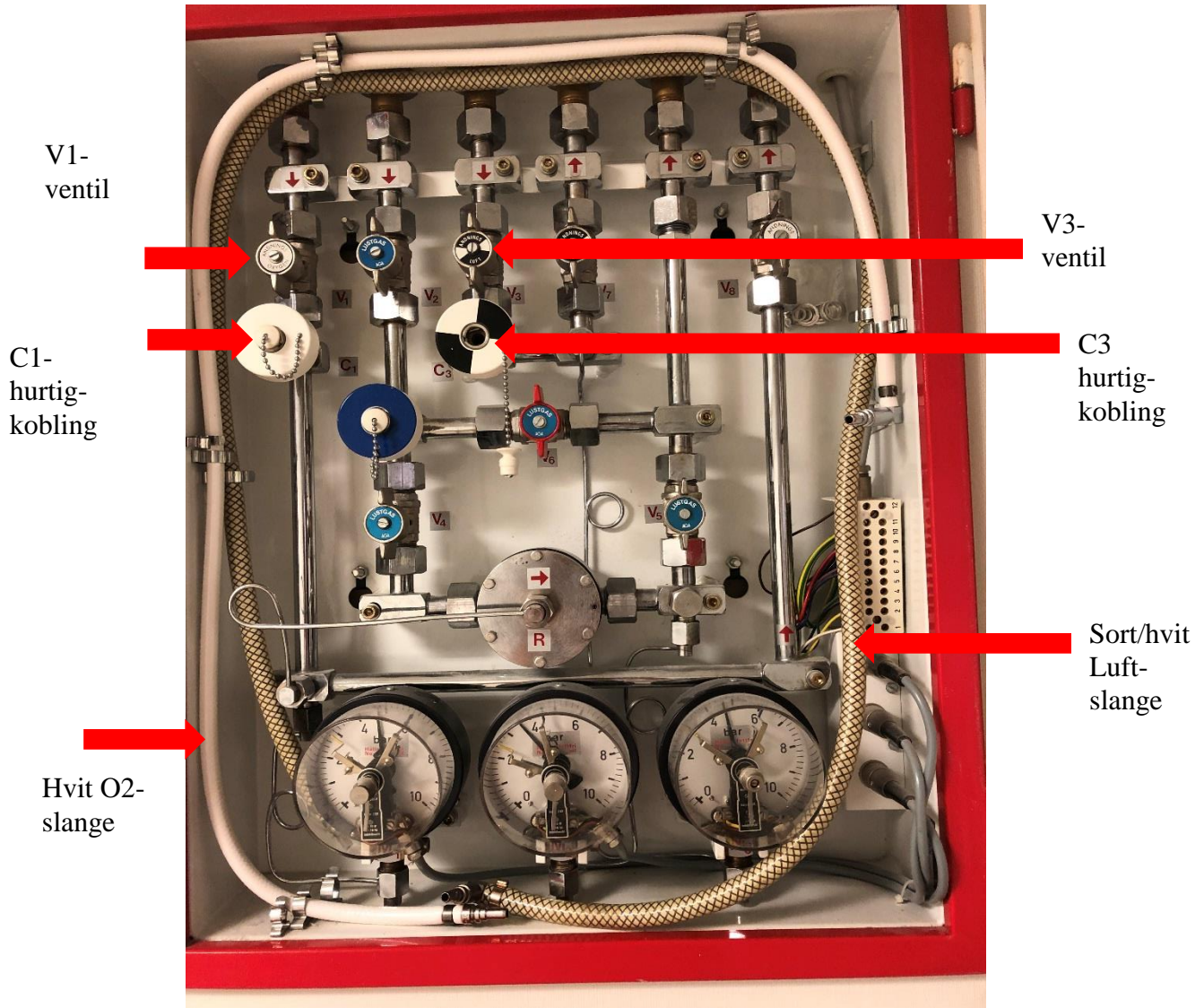

Kryssreferanser

Eksterne referanser