

 Kirurgisk poliklinikk SSK		Retningslinje	
Rektalprobe - rengjøring Kirurgisk poliklinikk - Kirurgiske senger SSK		Side 1 av 1	
Dokument ID: II.SOK.KSK.POL.2.URO-2	Godkjent dato: 14.11.2024	Gyldig til: 14.11.2026	Revisjon: 14.00

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Kirurgiske senger SSK/Kir.pol/Pasienter og brukere

Omfang: Prosedyren gjelder for de som rengjør rektalproben.

Hensikt: Å sikre riktig, forsvarlig og god sykepleie/behandling til pasienter.

Ansvar: Leder har ansvar for at prosedyren er tilgjengelig og kjent i avdelingen. Sykepleier er ansvarlig for at prosedyren blir fulgt.

Definisjon:

Rengjøre rektalproben til ultralydapparatet for å hindre smittespredning mellom pasienter

HANDLING

Utstyr:

- OxyWipes
- Engangs føringsnål og deksel

Ansvarlig sykepleier:

Ved TRUSP (Transrektal prostatabiopsi):

- Bruk engangs føringsnål og deksel. Disse kastes etter hver pasient i stikkavfallsdunk.
- Dersom det ikke brukes engangsutstyr: Fjern føringsnål og grønt plastdeksel fra rektalproben. Skyll gjennom føringsnåla og kanalene i dekselet med 10 ml sprøyte og vann. Vask begge umiddelbart i dekontaminatoren i rist med lokk.
- Fjern kondomet fra proben, og tørk av gel med OxyWipes klut.
- Tørk deretter proben og ledning med OxyWipes kluter, og la det virke i 5 min.
- Dersom det ikke brukes engangsutstyr: Skal føringsnål og grønt plastdeksel leveres ferdig vasket til sterilisering.

Ved TRUL (transrektal ultralyd):

- Fjern kondomene fra proben, og tørk av gel med OxyWipes.
- Fjern svart og/eller hvit plastdeksel fra rektalproben, og vask deksel umiddelbart med OxyWipes
- Tørk deretter proben og ledning med OxyWipes, og la det stå i 5 min.

Kryssreferanser

[II.SOK.KSK.POL.2.URO-1](#) [Prostatabiopsi \(TRUSP\)](#)
[Kirurgisk poliklinikk, Kirurgiske senger SSK](#)

Eksterne referanser

Utarbeidet av: Elianne Wathne	Fagansvarlig: Hans Thorwild Thomassen	Godkjent av: Mette Christine Emanuelsen	
---	---	---	--