

PASIENTER OG BRUKERE

SJEKKLISTE FOR TRIAGEOMRÅDE

Utføres av dagvakt hver morgen. Sett kryss fortløpende etter utført sjekk og din signatur nederst

		MAN	TIRS	ONS	TOR	FRE	LØR	SØN
UKE :	DATO :							
O2 - apparat testes								
3 stk - O2 kolber under brannteppe (minst 50 bar)								
Sug testes, 2 hvite, 2 grønne, 2 oransje, 2 svarte kateter til sug fylles på.								
3 brillekateter, 2 masker m/reservoar, 2 svelgtuber.								
Philips'ene sees over og tørkes av, kabler og mansjett vaskes.								
Blodtrykksmansjett i 3 størrelser i skuff.								
SpO2 utstyr, EKG kabler til Philips og kabel til oxytip med blå ende.								
Standardtralle etterfylles og sprites over.								
Full risikoboks byttes ved behov (husk merking).								
Ringesnor SKAL sprites hver morgen								
Stetoskop - rengjøres med mildt såpevann								
Øretermometer sjekkes, sprites over på håndtak (ikke sensoren)								
Vaske veggskinne og vinduskarm.								
Ventilasjonsbag m/maske: 1 voksen								
Sjekk at klokkene er riktig.								
Datamaskin tørkes med tørr klut, restarteres daglig – sprite tastatur og mus								
EKG apparatene rengjøres, legg barberhøvler i skuffen								
Sjekk innhold + vaske utstyr i trillbare monitorer								
Sjekk at det er hemofec og Cobas Liat tester i kjøleskap (heng ut brikker)								
SYRE-BASEROMMET generell rydding og vasking samt tømme søppel.								
Urinstix instr. rengjøres daglig. Se bruksanvisning.								
Matingsbord urin stix i Vircon								
Skifte papirunderlag, sprite benk v/ urinstixinstrumenter								
Kontrollsjekk blodsukkerapparatet – sett til ladning – 1 eske kyvetter ved apparatet								
Kontroll Ketoner apparatet								
Hvit skal sjekkes hver uke, og blå/gul sjekkes hver mnd. Se eget skjema over stixapp								
Hjelpe SAL med å vaske bærer hver fredag								
Tøm søppel, rydd før vaktskifte dag/aften og aften/natt								
Alle gardinene i triage skal byttes hver måned. Skal byttes første mandag i hver måned. Signer på hver enkelt gardin med dato								
Signatur								

 Dokument ID:
II.SOK.MEK.SSK.2.c-15

 Fagansvarlig:
**Chris Peter Grasaas-
Albrecht**

 Godkjent av:
**Chris Peter Grasaas-
Albrecht**

 Godkjent dato:
09.07.2024

 Revisjon:
5.00