


VEILEDNING KNE/ALBUELEIE - OPERASJON - SSA

Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/OPERASJON/Pasienter og brukere/Diverse faglige retn.linjer

KNE / ALBU - INSTRUKS

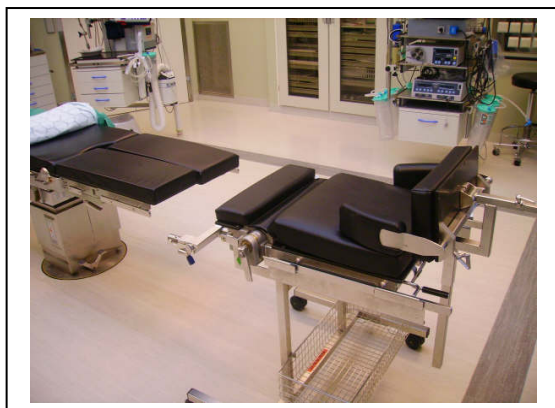

Utstyr til leiring kjøres inn på stue før pasienten tas inn.

Universalbord skal stå på sokkel

Pasienten kjøres inn på stue på annet bord (strekkbordet



Bordene fjernes på begge sider



Kne / Albu ansats kjøres inn til universalbordet

VEILEDNING KNE/ALBUELEIE - OPERASJON - SSA




OBS !-
Løsne låsemekanisme før man kjører ansatsen helt inn til universalbordet



Kjør bordet opp , og fjerne tralle



Fjerne nederste støtte (skal på igjen senere i prosessen)

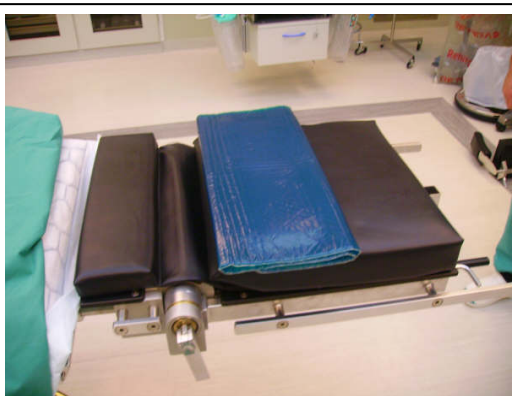


Legge brettet gele pute på plass hvor pasienten skal ha knærne


VEILEDNING KNE/ALBUELEIE - OPERASJON - SSA



Når pasienten er lagt i narkose, så flyttes pasienten over på bordet . **OBS** stilling for knærne !

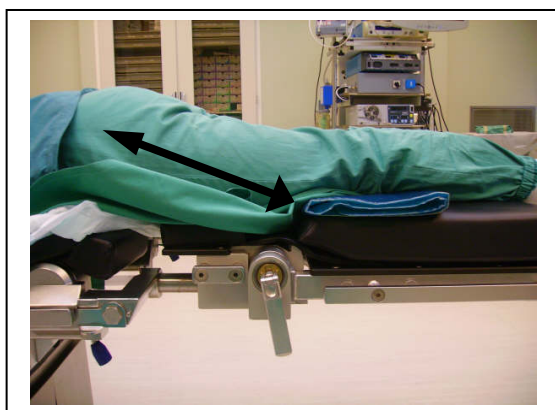

VIKTIG !!
Obs avstand mellom trochanter og kneleddet – Bordet må justeres til riktig avstand

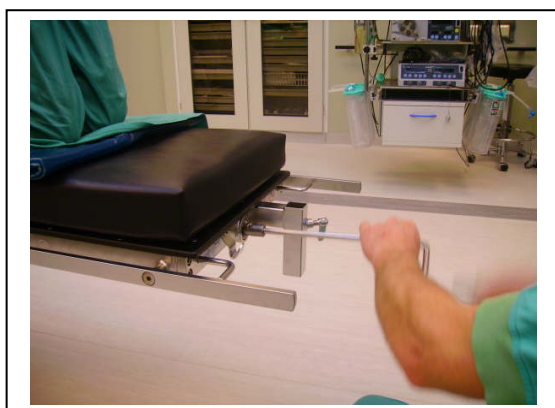

Justere avstand ved å forlenge / forkorte avstanden ved bruk av skru redskap nederste



Løsne låse mekanisme på begge sider av bordet.



VEILEDNING KNE/ALBUELEIE - OPERASJON - SSA

Neste fasene er viktig iht pasient sikkerhet og skjer i forholdsvis rask rekkefølge

Dra ut begge spak nederst på bordet



Støtte pasientens føtter så de ikke glir nedover eller til sidene



Når de 2 forrige aksjonene er utført, så kjør "LEG DOWN" med fjernkontrollen



Hold igjen og støtte pasientens vekt mens "LEG DOWN" fasen utføres



VEILEDNING KNE/ALBUELEIE - OPERASJON - SSA


Låse på begge sider



Pasientens stilling før neste fasen
OBS – I virkelighet må man støtte pasienten til en hver tid



Monter Posterior / Lateral støtte på bordet

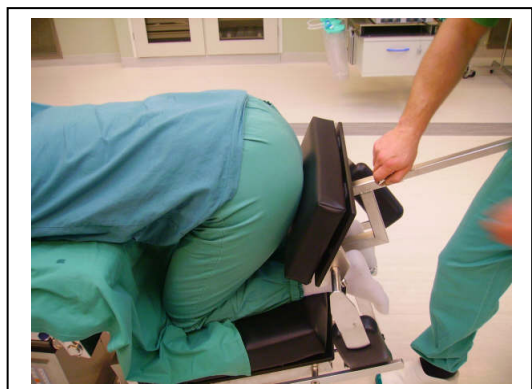

Når Posterior / Lateral støtten er på plass så kan pasienten flyttes nedover på bordet så abdomen er utenfor bordkanten

VEILEDNING KNE/ALBUELEIE - OPERASJON - SSA

Tilpasse de lateral støttene , i tillegg brukes side støtter for a sikre pasienten mot lateral bevegelser

Bruk denne typen pute til polstring av ekstra sidestøtter



Pasientens stilling ved ferdig leiering-

Obs bordet må fin justeres hode opp / ned evt når operatoren er på plass



Pasienten i stabil leie


Og klar for operatøren til å bestemme operasjonsnivå og stille inn microscop

Etter avsluttet inngrep så kjøres prosessen i revers

VEILEDNING KNE/ALBUELEIE - OPERASJON - SSA



Fjerne side støttene

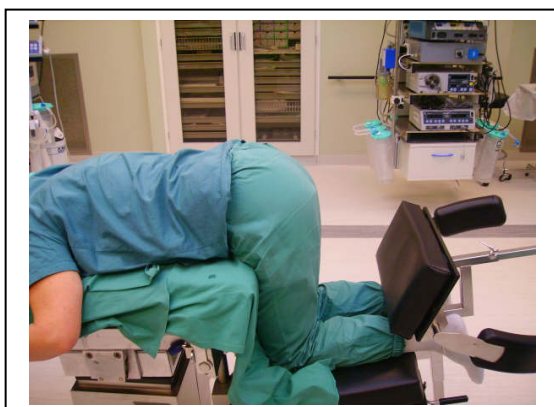

**Pasienten flyttes oppover så
abdomen ligger på bordet**




**Posterior / Lateral støtte
ansats fjernes**



**Låsemekanisme på begge
sider løsnes**

VEILEDNING KNE/ALBUELEIE - OPERASJON - SSA

Som før, dras ut begge spak mens man støtter pasientens føtter

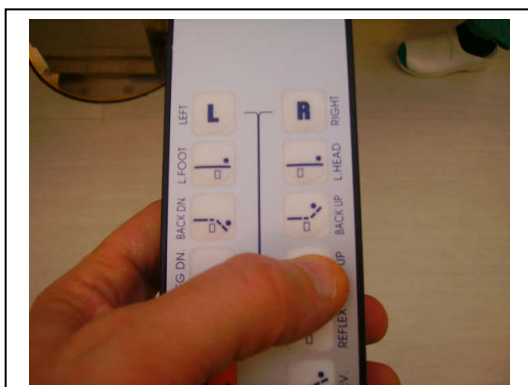

Når spakene er dratt ut og pasienten er trygg støttet så kjører man "LEG UP" på fjern kontrollen



Hold igjen og støtte pasientens vekt mens "LEG UP" fasen utføres




Låse på begge sider-


Pasienten er nå i trygg mage leie og kan flyttes over på et annet bord i rygg leie hvis ønskelig

VEILEDNING KNE/ALBUELEIE - OPERASJON - SSA


Demontering av kne / albu ansats

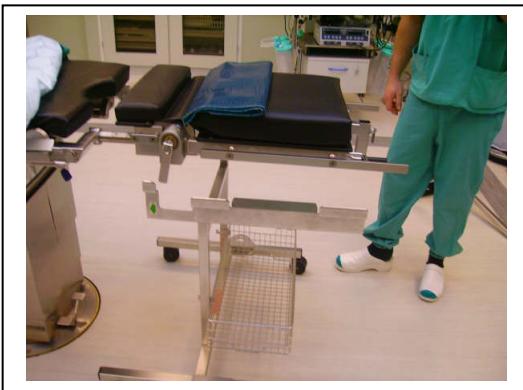

**Kjøre bordet opp og plassere tralle under –
Obs er viktig med ganske nøyaktig plassering**

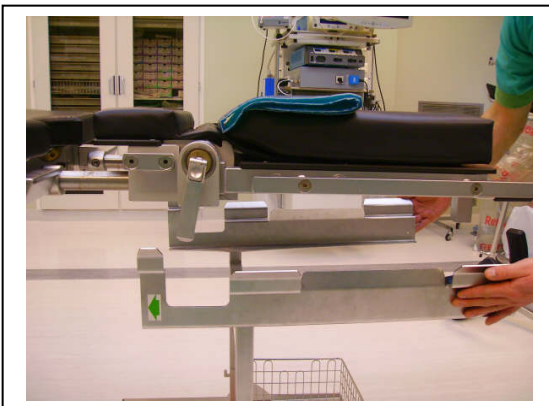


Riktig tralle plassering

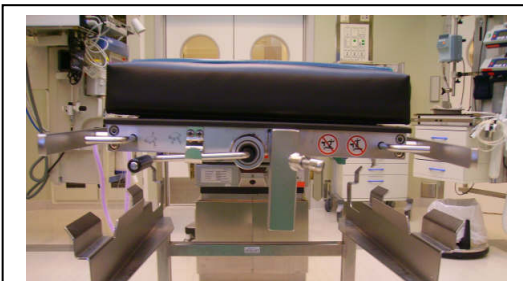

VEILEDNING KNE/ALBUELEIE - OPERASJON - SSA

Riktig plassering sett bakfra

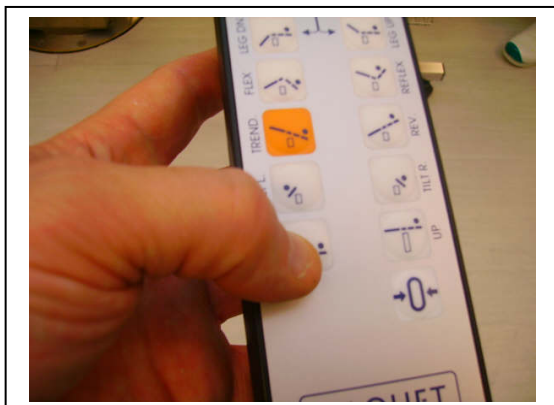

Kjør bordet ned –

OBS ansatsen skal så vidt sitte på tralle ikke kjøre for langt ned




Ansatsen i riktig høyde iht bordet. Klar for videre demontering



Lås opp på begge sider som ved montering

VEILEDNING KNE/ALBUELEIE - OPERASJON - SSA

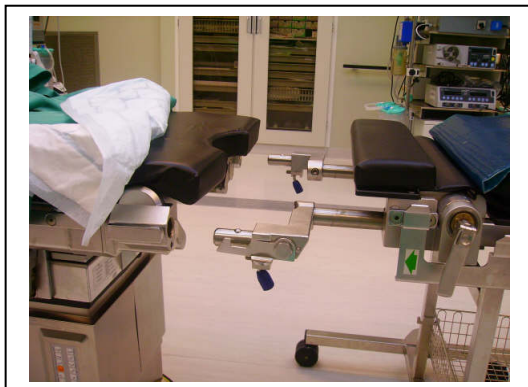

**Kjøre tralle ut fra bordet
komplett med ansats**



**Montere bordendene på
vanlig måte**



TA TA !! FERDIG 😊