

		<b>Somatikk Arendal</b>		<b>Retningslinje</b>	
<b>STERILISERING VED BRUK AV PLASMA STERILISATOR - OPERASJON - SSA</b>					
Dokument ID: <b>II.SOA.AIO.STER.5-8</b>		Godkjent dato: <b>30.09.2024</b>		Gyldig til: <b>30.09.2026</b>	
Revisjon: <b>10.00</b>					

Somatikk Arendal\Anestesi, intensiv, operasjon\STERILSENTRAL\Smittevern

## HENSIKT

Sikre sterilt utstyr til aseptiske prosedyrer.  
Sterilt = uten liv av mikrober og sporer.

## OMFANG

Personalet i Sterilsentralen som har fått opplæring i Sterilsentralens arbeid.

## ANSVAR

Sterilsentral ansatte etter spesiell opplæring i sterilisering.  
Teknisk personell er ansvarlig for vedlikehold av autoklaven.

## GODS

Varme ømfintlig, som robot-optikk, fleksible endoscop, ultralydprober, flowmeter prober, laser sonder m.m.

## TILTAK

Før pakking og sterilisering må godset kontrolleres at det er rent og **tørt**. Rengjøring og desinfeksjon skal skje på brukerstedet. Det må ikke være noen form for cellulose i pakkene så som kompress, tupfer eller instrument-lister av papir.

Stoffer som inneholder cellulose eller væske eller absorberende stoffer som svamp eller skumplast kan ikke steriliseres i plasma-autoklaven. Emballasjen må også være fri for cellulose.

## HANDLING

Pakk godset inn i egnet emballasje, med kjemisk indikator inni pakken. Dokumentasjonsskjema med innhold og sporenummer fylles ut for begge maskinene og signeres ved endt sterilisering. Gods merkes med batchnummer. *En biologisk sporeprøve steriliseres med hver last og dyrkes i 20 minutter i egen godkjent inkubator. Dette gjelder for begge sterilisatorene.*

### Prosedyre for **Dico-maskin**:

1. Slå på maskinen ved hjelp av on-off bryter. Etter 10 sek. viser displayet AUTO/MODE, trykk AUTO.
2. Neste bilde, trykk start for start av program. Da varsler en «stemme» at maskinen har startet (engelsk).
3. Under prosessen vises MONITOR i displayet hvor vi kan se forløpet i prosessen. En stemme sier ifra når den er ferdig. Se for øvrig bruksanvisning på veggen ved siden av autoklaven.
4. Åpne døren, kontroller pakkene og kjemisk indikator som skal ha skiftet til «godkjent» farge og sett sporeprøven til dyrkning. Skal dyrkes i 48 timer.

Det er egen prosedyre for **Matachana-maskin** og maskinen brukes kun etter opplæring. Egne bilder viser last-type og mengde og hvilken batchindikator og hulromstest som skal være med i de ulike programmene. Sterilisatoren revalideres hvert år.

Utarbeidet av enhetsleder: <b>Christin Thomassen Dimopoulou</b>	Fagansvarlig: <b>Anette Dorholt</b>	Godkjent av: <b>Christin Thomassen Dimopoulou</b> <b>Christin Thomassen Dimopoulou</b>	
---	-------------------------------------	--	--