

		Somatikk Arendal		Retningslinje
BRUKSANVISNING FOR OPPTAK AV ENDOSKOPISE INNGREP PÅ OPR.STUENE - OPERASJON - SSA			Side 1 av 1	
Dokument ID: II.SOA.AIO.OPA.2.div-19		Godkjent dato: 18.04.2023	Gyldig til: 18.04.2025	Revisjon: 0.08

Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/OPERASJON/Pasienter og brukere/Diverse faglige retn.linjer

OPPRETTELSE AV WORKLIST I DIPS:

- Start **DIPS**
- Søk og hent fram den aktuelle pasienten
- Velg **RUTINE**
Velg **HENVISNING**
Velg **BILLEDDANNENDE UNDERSØKELSE**
- Velg **NY**
Mottatt fra: trykk på **”kikkert”**, merk av for søk på etternavn og velg operatør
Avdeling: Trykk på pil og velg aktuell avdeling (for eksempel KIR)
Ressurs: Skriv **MIS**
Dato: Sjekk riktig dato (klokkeslett kan stå som det er)
Und. Kode: Velg **Mini Invasivt Senter**
Beskrivelse: Skriv operasjonstype
- Tast **LAGRE** og lukk.

OPPTAK AV LAPAROSKOPI MED WORKLIST:

1. Start med å slå på maskinen SONY BZMD-1
Lurt å slå den på tidlig da det tar litt tid før den virker.
2. Klikk på symbolet på skjermen der det står BZMD-1

Vent til det kommer opp en rad av symboler på venstre side av skjermen.
3. Trykk på New Study
4. Clear
5. Trykk på Worklist
6. Finn pasientens navn på Worklist og trykk 1 gang med venstre musetast
Trykk OK

Opptak: Trykk på RECORD

Stans av opptak: Trykk på STOP

7. For å gå ut av programmet trykk på Close Study.
Gjenta denne prosedyren for hver pasient det skal gjøres opptak av.

OBS: Kirurgen skal selv sende opptak/bilder som skal lagres/brennes ved Mini Invasivt senter

Utarbeidet av: Enhetsleder Janne Jettestad	Fagansvarlig: Enhetsleder Janne Jettestad	Godkjent av: Ikke styrt	
--	---	-----------------------------------	--