

Huskeliste for Leica ST5020 Multistainer, Cytologisk og histologisk diagnostikk. Avd. for patologi SSK

Side 1 av 3

Dokumentplassering:

II.MSK.Pat.2.2.1-16

Godkjent dato:

20.08.2024

Gyldig til:

20.08.2026

Dato endret:

05.09.2024

Revisjon:

20.03

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Cytologisk og histologisk diagnostikk/Cytologisk laboratorium

DISTRIBUSJONSliste: EK, skuff på lab.


ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Lagt inn nytt bilde av innhold i karene.

Skifte av reagenser:

MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG
Morgen				
Ny etanol og xylen		Sjekk om etanol og xylen må etterfylles	Sjekk om etanol og xylen må etterfylles	Sjekk om etanol og xylen må etterfylles
Ny OG-6, EA-50 og Hematoxilin hver 4. uke, kan vurderes etter mengde farging.	Filtrer Hematoxilin	Filtrer Hematoxilin	Filtrer Hematoxilin	Filtrer Hematoxilin
Ny May Grunwald og Giemsa hvis tømt ut fredag,	Ta snerk av MGG. Evt etterfyll med Metanol	Ta snerk av MGG. Evt etterfyll med Metanol	Ta snerk av MGG. Evt etterfyll med Metanol	Ta snerk av MGG. Evt etterfyll med Metanol.
Ny buffer til MGG	Ny buffer i andre bufferkar	Ny buffer i andre bufferkar	Ny buffer i andre bufferkar	Ny buffer i andre bufferkar
Ettermiddag:				
Vurder om det er behov for å tømme xylen og etanolbad	Vurder behov for å tømme xylen og etanolbad.	Vurder behov for å tømme xylen og etanolbad	Vurder behov for å tømme xylen og etanolbad	Tøm ut all etanol, xylen og vann
				Filtrer OG-6 og EA-50
Ta ut Hematoxilin	Ta ut Hematoxilin	Ta ut Hematoxilin	Ta ut Hematoxilin	Ta ut Hematoxilin
Tøm første buffer, flytt fram	Tøm første buffer, flytt fram	Tøm første buffer, flytt fram	Tøm første buffer, flytt fram	Tøm ut Giemsa, May Grunwald og buffer hvis mye brukt, vurderes.

DokumentID:D22064

Utarbeidet av: Fagbioingeniør Grete von der Ohe	Fagansvarlig: Grete von der Ohe	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Verifisert av: 14.08.2024 - Linda Kvelland Skaara
---	---	--	---

 SØRLANDET SYKEHUS	Huskeliste for Leica ST5020 Multistainer, Cytologisk og histologisk diagnostikk. Avd. for patologi SSK				Side: 3 Av: 3
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.2.1-16	Utarbeidet av: Fagbioingeniør Grete von der Ohe	Fagansvarlig: Grete von der Ohe	Godkjent dato: 20.08.2024	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Revisjon: 20.03

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Cytologisk og histologisk diagnostikk/Cytologisk laboratorium



Kryssreferanser
Eksterne referanser