

Loggskjema for utført vedlikehold småinstrumenter, ImTra SSK.

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

II.MSK.ImTra.2.g.3.3-1

Godkjent dato:

28.12.2021

Gyldig til:

28.12.2024

Dato endret:

28.12.2021

Revisjon:

3.04

Medisinsk serviceklinikk/Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin SSK/Pasienter og brukere/Immunologi/Manuelle analyser

DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Papirform ved Hamilton diluter.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 28.12.2024 uten endringer i dokumentet.

Hamilton diluter: Hver fredag

- Skylls igjennom med 70 % sprit. Skyll x 3 med sprit, la stå med sprit i ca. 30 min.
- Skyll deretter godt igjennom med nytt vann (prime 2 x 3 ganger).
- Lag til ny kolbe med vann.

Grant vannbad: Månedlig

- Koble fra strøm i vegg, deretter kobles ledningen fra vannbadet.
- Bær vannbadet til vasken og tøm innhold. Vaskes utvendig med lunket vann. Stålbeholderen og lokket vaskes med klut og mildt såpevann. Etter tørking kan vannbadet fylles med nytt vann og skrues på igjen.

Pluggo røravkorker: Månedlig

- Se [Bruk og vedlikehold av Pluggo røravkorker, ImTra SSK](#)

Utstyr	Dato	Signatur	Utstyr	Dato	Signatur
Diluter+Vannbad+Pluggo			Diluter+Vannbad+Pluggo		
Diluter			Diluter		
Diluter			Diluter		
Diluter			Diluter		
Diluter+Vannbad+Pluggo			Diluter+Vannbad+Pluggo		
Diluter			Diluter		
Diluter			Diluter		
Diluter			Diluter		
Diluter+Vannbad+Pluggo			Diluter+Vannbad+Pluggo		
Diluter			Diluter		
Diluter			Diluter		
Diluter			Diluter		
Diluter+Vannbad+Pluggo			Diluter+Vannbad+Pluggo		
Diluter			Diluter		
Diluter			Diluter		
Diluter			Diluter		
Diluter+Vannbad+Pluggo			Diluter+Vannbad+Pluggo		
Diluter			Diluter		
Diluter			Diluter		
Diluter			Diluter		
Diluter+Vannbad+Pluggo			Diluter+Vannbad+Pluggo		
Diluter			Diluter		
Diluter			Diluter		
Diluter			Diluter		
Diluter+Vannbad+Pluggo			Diluter+Vannbad+Pluggo		
Diluter			Diluter		
Diluter			Diluter		
Diluter			Diluter		

Signer for ferdig utført vedlikehold på loggskjemaet.

DokumentID:D22822

Utarbeidet av: Kristine Thomassen Bergset Enhetsleder	Fagansvarlig: Kristine Thomassen Bergset	Godkjent av: Avdelingsleder Lene Haugen Tryland	Verifisert av: 26.02.2016 - Synnøve Nævdal
---	--	---	--