		Medisinsk serviceklinikk		Generelt dokument
Urinalyser på Clinitek Status - PNA prosedyre, Medbio SSK				Side 1 av 3
Dokumentplassering: II.MSK.MBio.6.4.10.2-4	Godkjent dato: 21.10.2024	Gyldig til: 21.10.2026	Dato endret: 21.10.2024	Revisjon: 10.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd for medisinsk biokjemi SSK/Pasient og brukere/Pre- og postanalytisk enhet/PNA

DISTRIBUSJONSLISTE: EK,

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Lagt til info om scanning av lot på strimler

HENSIKT

Prosedyren skal sikre riktig analysering av urinstrimmeltest på Clinitek Status

OMFANG

Prosedyren gjelder for personell ved husets avdelinger og poliklinikker som er opplært i bruk av Clinitek Status

UTFØRELSE

Prøvemateriale: Frisklatt, romtemperert urin. Morgenurin anbefales, men spot urin kan også benyttes.

Teststrimmel: Multistix 7. Oppbevares i romtemperatur, med lokket påskrudd. Holdbar til påført utløpsdato.

Analysering og oppbevaring: **Bland urinprøven godt før analysering** for å sikre riktig resultat. Ved henstand vil celler og bakterier kunne synke til bunns og gi feil avlesning. Dersom prøven ikke kan analyseres straks bør den oppbevares kjølig, og analyseres innen 4 timer etter prøvetaking. Dersom urinprøven har unormal farge (eks. rød, sort eller brun), må urinprøven leveres MedBio for vurdering.

Merk uringlasset (ikke korken) tilstrekkelig med pasientens navn og 11-sifret personnummer.


Analysering: Skjermen berøres ved bruk av finger.

- **Strip Test.**
- **Enter new operator name** – benytt strekkodeleser og scann ditt brukernavn. Evt. tast inn manuelt ved hjelp av knappen som er merket ABC.
- **Enter new patient** – scann pasientens 11-sifret personnummer. For å sikre svaroverføring til DIPS er det viktig at alle 11 siffer i pasientens personnummer registreres.
- **Enter new lot/use last lot** – Hvis loten på boksen er lik fra forrige lot, trykk **use last lot**. Hvis det er ny lot, trykk **Enter new lot** og scann boksen.
- **Prepare test.**
 - Ta ut en strimmel (Multistix 7), sku på lokket igjen.
 - Berør feltet START, du har nå 8 sekunder på deg til å gjøre punktene under.
 - Dypp strimmelen i en godt blandet, romtemperert urinprøve.
 - Dra strimmelen forsiktig langs kanten på uringlasset for å fjerne overskuddsurin.
 - Sett så strimmelen, med kanten ned på et absorberende papir.
 - Plasser strimmelen i analyseporet på matebordet i instrumentet.
 - Etter analysering: Kast teststrimmelen i vanlig avfall og tørk av analyseporet med en fuktig tupfer.

Dersom feil ID benyttes må MedBio kontaktes umiddelbart slik at feil svar slettes fra DIPS.

DokumentID:D25750

Utarbeidet av: Fagbioingeniør Aina Olesen	Fagansvarlig: Enhetsleder Malene Lohne	Godkjent av: Avdelingssjef Marianne Skomedal	Verifisert av: 18.10.2024 - Kvalitetskoordinator Ingunn Gåsvær
---	--	--	--

 SØRLANDET SYKEHUS	Urinalyser på Clinitek Status - PNA prosedyre, Medbio SSK				Side: 2 Av: 3
Dokumentplassering: II.MSK.MBio.6.4.10.2-4	Utarbeidet av: Fagbioingeniør Aina Olesen	Fagansvarlig: Enhetsleder Malene Lohne	Godkjent dato: 21.10.2024	Godkjent av: Avdelingssjef Marianne Skomedal	Revisjon: 10.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd for medisinsk biokjemi SSK/Pasient og brukere/Pre- og postanalytisk enhet/PNA

Andre viktige forhold:

- Matebordet må ikke skyves inn i instrumentet – instrumentet trekker automatisk inn matebordet når det er gått 8 sekunder etter at START er trykket. Dersom matebordet skyves inn, vil det kunne sette seg fast og apparatet må til service.
- Online forbindelse mellom apparat og DIPS vises ved en datamaskin oppe i venstre hjørne. Dersom det er kryss over denne betyr det at online forbindelse mangler. Sjekk at nettverkskabel er satt ordentlig i, kontakt eventuelt Medisinsk biokjemi.
- Bytte av papir:
 - Åpne begge lokkene bak på Clinitek Status og følg anvisningen for papirbytte.
 - Fjern noen runder av papirrullen slik at alle rester av lim forsvinner.
 - Klipp enden som en spiss, da er det enklere å få den riktig på plass i skriveren.
 - Legg papirrullen riktig vei, med «blank» side vendt opp. Dersom rullen legges feil vei vil det ikke komme skrift på papiret.
 - Bruk kun papirrull som er egnet for Clinitek Status.

FEILKILDER

- For kald eller varm urinprøve.
- For gammel urinprøve.
- Ikke blandet eller dårlig blandet urinprøve.
- Sterk egenfarge på prøven.
- Medikamentbruk – se pakningsvedlegg for aktuelt medikament for utvidet informasjon.
- Instrumentelle forhold som feil bruk av instrumentet, feil oppbevart stix, feilregistrering av pasientinfo.

VEDLIKEHOLD


Superbruker på din avdeling/poliklinikk har ansvar for å lage et system for vedlikehold. Oppfordrer til bruk av skjema for enklere oversikt: [Vedlikeholdsskjema Clinitek Status, Medbio SSK](#)

Daglig:

- Løft ut testholderen fra matebordet og skyll under rennende vann, tørk godt.

Ukentlig:

- Matebordet med testholder trekkes forsiktig ut av instrumentet og plasseres i virkon i 10 minutter. OBS: Delen med den hvite kalibreringsstripa må ikke komme i kontakt med virkon.
- Delene skylles så i vann, og tørkes godt. OBS: Kalibreringsstripa må ikke komme i kontakt med vann. Dersom dette skjer må det tørkes vekk med en ren bomullspinne. Ved synlig søl, hakk og lignende på kalibreringsstripa – kontakt Medisinsk biokjemi.
- Slå av instrumentet og vask det utvendig med en fuktig klut eventuelt med såpevann.
- Dersom skjermen er synlig tilgriset så kan den vaskes ved å bruke et papirhåndkle fuktet med virkon. La papirhåndkle ligge på i 10 minutter for optimal effekt. Tørk deretter av med rent vann.
- Barkodeleseren desinfiseres ved bruk av overflatedesinfeksjon.

 SØRLANDET SYKEHUS	Urinalyser på Clinitek Status - PNA prosedyre, Medbio SSK				Side: 3 Av: 3
Dokumentplassering: II.MSK.MBio.6.4.10.2-4	Utarbeidet av: Fagbioingeniør Aina Olesen	Fagansvarlig: Enhetsleder Malene Lohne	Godkjent dato: 21.10.2024	Godkjent av: Avdelingssjef Marianne Skomedal	Revisjon: 10.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd for medisinsk biokjemi SSK/Pasient og brukere/Pre- og postanalytisk enhet/PNA

FORBRUKSVARER – bestillingsnummer:

- Papir: 10003393.
- Multistix 7: 10175295

VED PROBLEMER

Dagtid: Tlf. 3458. Vakt/utom ordinær arbeidstid: Tlf. 3444.

Kryssreferanser:

[II.MSK.MBio.6.4.10.2-9 Vedlikeholdsskjema Clinitek Status, Medbio SSK](#)

Eksterne referanser:

[Brukerhåndbok Clinitek Status + Analyser](#)