

**Urinytologi, Cytologisk og histologisk diagnostikk. Avd. for patologi, SSK**

Side 1 av 2

Dokumentplassering:

II.MSK.Pat.2.2.2-3

Godkjent dato:

01.03.2024

Gyldig til:

01.03.2026

Dato endret:

14.08.2024

Revisjon:

5.01

Medisinsk serviceklinikk\Avd for patologi SSK\Pasienter og brukere\Cytologisk og histologisk diagnostikk\Cyto- og histodiagnostikk

DISTRIBUSJONSliste: EK, Eventuelt hvor godkjent papirversjon finnes.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Endret på tittel i tekst samt endret navn på prosedyre.

## Omfang

Denne prosedyre gjelder for bioingeniør på cytologisk og histologisk diagnostikk.

## Hensikt

Retningslinjer for besvaring av urinprøver.

## Handling

Bruk håndscanner på objektglasset for å hente opp prøven i LVMS.

Marker funn med tusjmerker på objektglasset.

## Normal urin, Parisklassifisering NHGUC

Bioingeniør legger inn svarkoder og ev tekst i screeningbildet og prøven skal remikroskoperes av bioingeniør. Etter remikroskopering må bioingeniør registrere seg som medscreeener og deretter signere prøven før den blir endelig besvart av hovedansvarlig bioingeniør.

[Brukerhåndbok LVMS, cytologi. Avd. for patologi SSK](#)

## Urin med funn

- Besvares av patolog etter at svarkoder og ev tekst er lagt til i screeningbildet slik at patolog kan overføre dette til diagnostikkbildet.
- Ved behov hentes tidligere relevante prøver i arkiv og mikroskoperes på nytt.
- Prøve legges i hylla til cytologiansvarlig lege.

## Diskrepans mellom hovedansvarlig og medscreeener

- Stryk hovedansvarlig
- Trykk deretter «til patolog» og legg inn riktige initialer.
- Endre svarkode og tekst
- Gi beskjed til opprinnelig hovedansvarlig om funn. Dersom hovedansvarlig ikke er tilstede skriv beskjed i meldingsfeltet i LVMS om hvilke prøver som får endret diagnose.
- Legg prøven i hylla til cytologiansvarlig lege.

## Prøver som alltid skal leveres patolog

- Kateterurin
- Cystoskopiurin

## Kryssreferanser

## Eksterne referanser

DokumentID:D28871

Utarbeidet av: Fagbioingeniør Anita Vasland	Fagansvarlig: Anita Vasland	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Verifisert av: 29.02.2024 - Linda Kvelland Skaara
--	--------------------------------	---	--

 SØRLANDET SYKEHUS	<b>Urincytologi, Cytologisk og histologisk diagnostikk. Avd. for patologi, SSK</b>				<b>Side: 2</b> <b>Av: 2</b>
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.2.2-3	Utarbeidet av: Fagbioingeniør Anita Vasland	Fagansvarlig: Anita Vasland	Godkjent dato: 01.03.2024	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Revisjon: 5.01

Medisinsk serviceklinikk\Avd for patologi SSK\Pasienter og brukere\Cytologisk og histologisk diagnostikk\Cyto- og histodiagnostikk