

**Behandling av frysesnitt. Leger. Avd. for patologi. SSK**

Side 1 av 1

 Dokumentplassering:  
**II.MSK.Pat.2.6-4**

 Godkjent dato:  
**15.02.2023**

 Gyldig til:  
**15.02.2025**

 Dato endret:  
**15.02.2023**

 Revisjon:  
**7.02**

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Legeprosedyrer  
 DISTRIBUSJONSLISTE: EK  
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Endret fra SymPathy til LVMS

**HENSIKT**

Beskrive hvordan frysesnitt skal håndteres

**OMFANG**

Denne prosedyre gjelder for overleger og LIS ved Avdeling for patologi, SSK.

**UTFØRELSE**

Navn og fødselsnummer på prøveglass og remisse må stemme overens.

- Dikter makrobeskrivelse til bioingeniør som skriver dette inn i LVMS,
- Antall preparatglass
- Antall vevsbiter
- Beskriv vevsbitens utseende, også med mål.
- Antall frysesnitt merket 1,2,3 osv., kun en vevsbit på ett frysesnitt.
- Evt. restmateriale

Deretter skjæres og farges snittene før mikroskopering.

Etter mikroskopering ringes diagnosen til operasjonsstue (oppgitt tlf.nr. på remisse).

- Skriv frysesnittsdiagnosen inn i LVMS, som foreløpig besvarelse. (Bruk håndscanner).
- Snitt legges tilbake på Histologisk enhet.

Ved ikke representativt materiale eller forventet materiale (f. eks. lymfeknute) må det bestilles dypere frysesnitt og det skal lages frysesnitt av evt. restmateriale.

**Vedlegg:**
**Kryssreferanser:**
**Eksterne referanser:**

Utarbeidet av: <b>Kvalitetskoordinator Britt Bringaker</b>	Fagansvarlig: <b>Seksjonsoverlege Grete Lill Holt</b>	Godkjent av: <b>Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen</b>	Verifisert av: <b>14.05.2020 - Linda Kvelland Skaara</b>
---	--	--	---