


# Bedriftsnavn: Sørlandet sykehus HF

## LSU sug

Filter. Skiftes 1 gang i måneden + etter sykdom og sykehusinnleggelse

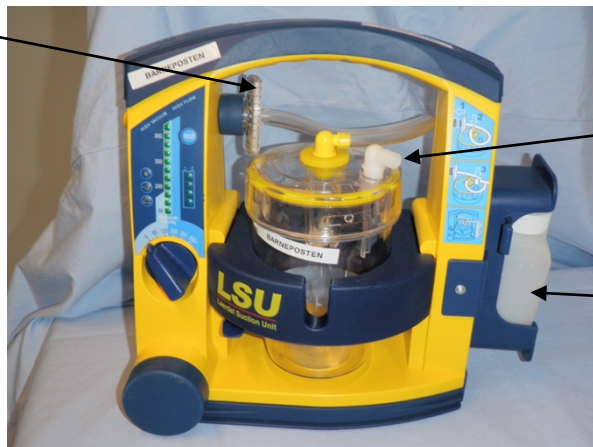

Tilkobling for sugeslange

Vannbeholder.  
Springvann

Sugestyrke



Batteriindikator

Innstillingsbryter for sugestyrke. Vanlig styrke er 200.

Apparatet skal stå mest mulig tilkoblet strøm for å sikre at du har nødstrøm hvis det skulle trenge. Apparatet har batterikapasitet.



Sekretbeholder

## Rengjøring

- Sekretbeholder
  - Tøm kolben ofte, men minst når den er  $\frac{3}{4}$  full for å unngå skade og suget skal fungere riktig.
  - Tøm innholdet i toalettet, skyll beholderen i kaldt vann og sett beholderen på plass igjen
  - Skal vaskes alle dager suget er i bruk
  - Ta fra hverandre alle deler
  - Skyll alle delene under kaldt rennende vann
  - Legg delene i varmt vann med mildt såpevann.
  - Rengjør alle flater med børste der det er mulig
  - Skyll i varmt vann og la delene lufttørke

## Desinfeksjon

Gjøres en gang pr. uke og hyppigere ved sykdom.

- Eller legge i Virkon i 30 minutter.
- Skyll med rennende vann og tørk av delene
- På sykehus kan delene vaskes i dekonterminator

## Hvis suget ikke virker:

- Sjekk om kolben er full
- Sitter lokket ordentlig på?
- Sitter alle slangene der de skal?
- Brudd/knekk på sugeslanger?

## Funksjonstest:

- Kontrollerer at suget fungerer som det skal eller må til service.
- Se kapittel 7 i bruksanvisningen for hvordan man utfører testen