

		Medisinsk serviceklinikk		Prosedyre	
Kontrollsnitt - HE og spesialfarger, Histologilaboratorium, Histologisk enhet, Avdeling for patologi, SSK				Side 1 av 2	
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.3.2.1-15		Godkjent dato: 23.10.2023	Gyldig til: 23.10.2025	Dato endret: 23.10.2023	Revisjon: 8.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Histologisk enhet/Histologilaboratorium

DISTRIBUSJONSLISTE: EK

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Erstattet MSB med Trikrom mtp snittykkelse 4,5 um. Byttet romnummer er etter flytting.

HENSIKT

Til de fleste histologiske spesialfarger skal det være med en kjent positiv eller kjent negativ kontroll. Kontrollsnittet brukes til å kontrollere at fargeprosedyren er korrekt utført. Dersom det positive kontrollsnittet ikke viser forventet resultat, har det oppstått en feil under fargingen. Prosedyren må i så fall gjentas.

OMFANG






Denne prosedyren gjelder for bioingeniører, histologisk enhet.

UTFØRELSE

- Kun én kontrollblokk for hver farge skal være i bruk av gangen.
- Kontrollblokker og tilhørende fargede snitt, som er i bruk, finnes i preparatkasse på hylle på rom 1013 BI, histologisk lab.
- Nye, godkjente kontrollblokker finnes i skuff merket «Godkjente kontroller for HE og Spesialfarger» på rom 1013 BI.
- Noter i skjema, [Kontrollblokker spesialfarger/HE, SKJEMA, Enhet for histologi, Avd. for patologi, SSK](#) når ny blokk tas i bruk, og om den forrige arkiveres eller kastes. Skjemaet finnes i perm på 1009 BI.
- Glass til kontrollblokker som er tomme/ikke lenger i bruk, arkiveres i blokkinnsats merket «Kontrollsnitt – arkiv» i hylle på 1013 BI.


Merking av kontrollsnitt

- SlideMate: Glassene merkes med kontrollblokkens ID:




Trykk settings-ikonet nederst i venstre hjørne.	
Velg Data	 Data >
Velg Templates	 Templates >
Velg Kontrol	< Templates Templates Calibration Kontrol LVMS
Bekreft	
Tilbake til Data, velg Items	 Items >
For SlideMate tilhørende vannskliemikrotom: Velg Kontroll spesfarg fra menyen. For SlideMate tilhørende andre mikrotomer: Velg Free Text	< Items Items UserItem6 kontroll spesfarg space

DokumentID: D31842

Utarbeidet av: Fagbioingeniør Hege Wiksén	Fagansvarlig: Hege Wiksén	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Verifisert av: 20.10.2023 - Linda Kvelland Skaara
---	-------------------------------------	--	---

		Kontrollsnitt - HE og spesialfarger, Histologilaboratorium, Histologisk enhet, Avdeling for patologi, SSK			Side: 2 Av: 2
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.3.2.1-15	Utarbeidet av: Fagbioingeniør Hege Wiksén	Fagansvarlig: Hege Wiksén	Godkjent dato: 23.10.2023	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Revisjon: 8.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Histologisk enhet/Histologilaboratorium

Edit	
Velg Default text og skriv inn ønsket tekst	Default text XXX
Bekreft	
Tilbake til visningsbilde, klikk grått felt øverst.	

- LVMS: **Prøvehåndtering – glass** – scan «fake» blokk 22KRH11999-01-05 – **les inn – søk Q** – merk alle/antall ønsket ktr.glass – **skriv ut glassetiketter**. La SlideMate få tid til å telle opp antall før det trykkes start.
- SlideMate: Stille tilbake til riktig template når ferdig: **Innstillinger – Data – Template – LVMS ny– V**

Snitting av kontrollsnitt

- Snitting av kontrollsnitt gjøres på rotasjonsmikrotom med en tykkelse på 3 µm.
Unntak:
Trikrom: 4,5 µm.
Congo: 10 µm. Snittes samtidig som pasientprøve. Blokk forsegles med parafin etter bruk.
- Kontrollsnittene oppbevares i snittesker merket med den aktuelle spesialfargen, i hylle på histologilab.

Kryssreferanser:

[II.MSK.Pat.2.3.2.2-9](#)

[Kontrollblokker spesialfarger/HE, SKJEMA, Enhet for histologi, Avd. for patologi, SSK](#)

Eksterne referanser: