

**HÅNDTERING AV STERILT ENGANGSUTSTYR-
STERILSENTRALEN SSK HF**

Side 1 av 3

Dokument ID:

II.SOK.AIO.SSK.5.-2

Godkjent dato:

02.01.2024

Gyldig til:

02.01.2027

Revisjon:

5.00

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Sterilsentral Kvalitetshåndbok/Prosedyrebok/STERILT LAGER-Kjerneprosessen 3- Håntering og utlevering av steril engangsutstyr

HÅNDTERING AV STERILT ENGANGSUTSTYR**FORMÅL:**

Sikre at varene er sterile fram til brukerstedet.

Sikre at egenprodusert og prefabrikkert sterilt utstyr oppbevares og håndteres på en måte som sikrer at det forblir sterilt og funksjonelt.

I Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner stilles det krav til gjennomføring av måling av luftkvalitet på sterilt lager. Mikrobetallet i luften angis i CFU/m³ luft (colony forming units). Antall CFU/m³ luft skal være mindre enn 100 CFU/m³ luft.

Omfang:

Personalet som arbeider på sterilt lager må ivareta strenge krav til hygiene og være klar over at en utvendig kontaminering av pakkematerialet under bestemte forhold kan forurense innholdet.

For å hindre at forpakningene med sterilt utstyr blir kontaminert eller ødelagt, er det viktig at de berøres minst mulig under lagring.

ANSVAR:

Enhetsleder er ansvarlig for enhetenes daglige drift.

Daglig ansvar ligger hos den som er oppsatt etter turnus.

Sterilsentralens ansatte utfører dette etter spesiell opplæring i steriltforsyningskjeden.

FREMGANGSMÅTE:

- **Bulk lager:** Her oppbevares varer i transportemballasje på paller og i reoler med justerbare hyller. Rommet er tørt, og er en overgangssone mellom leverandørene og sterilt lager.
- **Sterilt lager:** Transportemballasjen skal ikke inn i det sterile lager. Kartongene er ofte skitne og kan inneholde insekter. Transportemballasjen fjernes i mottaksrommet.
 - Sterilt lager er tørt og har gode lysforhold.
 - Jevn temperatur mellom 18 og 22 °C. Varene utsettes ikke for direkte sollys. Utvendige persienner er montert.
 - Luftfuktighet skal ligge mellom 35 og 75% RH.
 - Tak, vegger og gulv er glatte slik at renholdet skal bli av god kvalitet. Det er etablert faste skriftlig renholdsrutiner.
 - Vinduene skal ikke åpnes.
 - Dørene til rommet skal alltid være lukket. Sterillager skal ha et overtrykk i forhold til nærliggende rom.

Pakke ut varer:

- Varene fraktes av sentralforsynings medarbeidere i transportemballasjen fra bulk lager til mottaksrom ved sterilt lager.
- Varene lastes inn gjennom luke av sentralforsynings medarbeidere til Bua og videre til sterilt lager av Sterilsentralens medarbeidere.

Utarbeidet av:
Leonor dos Santos

Fagansvarlig:
Maureen J. Prins

Godkjent av:
Maureen Jennifer Prins

□

		HÅNDTERING AV STERILT ENGANGSUTSTYR- STERILSENTRALEN SSK HF			Side: 2 Av: 3
Dokument-id: II.SOK.AIO.SSK.5.-2	Utarbeidet av: Leonor dos Santos	Fagansvarlig: Maureen J. Prins	Godkjent dato: 02.01.2024	Godkjent av: Maureen Jennifer Prins	Revisjon: 5.00

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Sterilsentral Kvalitetshåndbok/Prosedyrebok/STERILT LAGER-Kjerneprosessen 3- Håndtering og utlevering av steril engangsutstyr

- Kontroller at transportemballasjen er hel, tørr og uten tilgrising.

Påfylling av lager.

- Hånddesinfeksjon før arbeidet med påfylling starter.
- Utstyret må ikke ligge tett, sammenpresset i kurv/ bakke.
- Sett varene på plass etter "FIFO" prinsippet (First In, First Out).
Dvs. sist ankomne varer skal settes innerst/ eller nederst slik at varer som har stått lengst på lager alltid tas først. Dette sikrer at de eldste artiklene blir brukt først.

Oppbevaring

- Transportemballasje skal ikke inn i sterilt lager
- Det skal ikke oppbevares usterile produkter i sterilt lager
- Varen skal oppbevares minimum 20 cm over gulvflaten
- Avstand til tak skal være minimum 45 cm
- Væskesøl skal ikke forekomme på overflater
- Insekter skal ikke forekomme

Holdbarhet

Holdbarhet for sterilt utstyr er avhengig av ytre faktorer som produksjonsmåte, steriliseringsmetode, pakkemateriale, lagringsbetingelser, transport og håndtering.

Holdbarhetsgrensen forutsetter at produktet er produsert, sterilisert, transportert, håndtert og lagret på en måte som har bevart emballasjen uskadd. Det forutsettes videre at emballasjen ikke er åpnet.

Holdbarhetstider:

Papir, 2 lag	3 mnd.
Papir/plast sveiset	1 år
Metallbeholder m/ filter (container)	6 mnd.

Holdbarhetstiden på fabrikkprodusert engangsutstyr er angitt av produsenten.

CE merking: Communautés Europeennes

- Alt utstyr som skal inn på Sterilsentralen skal være CE merket. Dette for å synliggjøre at produktet oppfyller de krav som stilles i henhold til regelverket.
- Egen produksjon: Produksjonen av sterilt utstyr ved sterilsentralen er unntatt fra kravet om CE merking, så lenge varene brukes internt.

Transport

Transport av sterilt utstyr skal foregå i lukkede eller tildekkede vogner eller i bakker med lokk.

- Se dokument: ["TRANSPORT AV STERILT UTSTYR FRA STERILSENTRALEN TIL BRUKERNE"](#)

Kryssreferanser

 SØRLANDET SYKEHUS	HÅNTERING AV STERILT ENGANGSUTSTYR- STERILSENTRALEN SSK HF				Side: 3 Av: 3
Dokument-id: II.SOK.AIO.SSK.5.-2	Utarbeidet av: Leonor dos Santos	Fagansvarlig: Maureen J. Prins	Godkjent dato: 02.01.2024	Godkjent av: Maureen Jennifer Prins	Revisjon: 5.00

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Sterilsentral Kvalitetshåndbok/Prosedyrebok/STERILT LAGER-Kjerneproses 3- Håndtering og utlevering av steril engangsutstyr

[II.SOK.AIO.SSK.5.-3](#)

[TRANSPORT AV STERILT UTSTYR FRA STERILSENTRALEN TIL
BRUKERNE- STERILSENTRALEN SSK HF](#)

Eksterne referanser