

## Nytt lotnummer-/mottakskontrollskjema, Enhet for blodtyperologi ImTra SSK.

Side 1 av 2

Dokumentplassering:

II.MSK.ImTra.2.f.16-3

Godkjent dato:

25.09.2024

Gyldig til:

25.09.2027

Dato endret:

25.09.2024

Revisjon:

5.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin SSK/Pasienter og brukere/Blodtyperologi/Mottakskontroll

DISTRIBUSJONSLISTE: EK, vaktperm B.17, Trådreol B.23: Ferdig kopierte skjema.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Lagt til at skjemaet leveres enhetsledelsen ved ny lot på ID-DiaCell I-II-III. Endret at kvalitetssertifikatet og pakningsvedlegg utføres av enhetsledelsen, ellers kosmetiske endringer

### NYTT LOTNUMMER


Artikkel:	Lot. nummer:	Holdbarhetsdato: OK? Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
<b>Tatt imot:</b> Dato:	<b>Tatt i bruk:</b> Dato:	<b>Når ny lot ID-DiaCell I-II-III tas i bruk, lever til Enhetsledelsen som utfører:</b> Sign.
Kl.slett:	Kl.slett:	IH-Com – endre forventet reaksjoner på scr. kontroller
Sign.:	Sign.:	Korrekt fortynning på daglige scr. kontroller
		Korrekt antigram
Gelkort væsknivå: OK?    Nei <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/>		<b>Utføres av enhetsledelsen:</b>
Gelkort sentrifugert? Dato: _____		Kvalitetssertifikat lagret?    Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
Gelkort annet:		Pakningsvedlegg som før?    Ja <input type="checkbox"/> Ny versjon <sup>1</sup> <input type="checkbox"/>
Celleløsninger <sup>2</sup> : Hemolyse?    Nei <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/>		Ny versjon pakningsvedlegg:
Reagens utfelling/blakket?    Nei <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/>		Etter innregistrering i BB-KvaliSYS leveres dette skjemaet til enhetsledelsen for oppdatering av <a href="#">Loggføring av pakningsvedlegg for analyser, Enhet for Blodtyperologi, ImTra SSK</a>
Mottakskontroll (registrer identitet på positiv og negativ kontroll ev. lotnummer, fortynning, grader resultatet):		
Resultat OK?    Nei <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/>		
Dato/sign.:		
Kommentar:		
Lotnummer <b>godkjent</b> for bruk (Gjøres av fagbioingeniør, enhetsleder, kvalitetskoordinator eller blodbanklege). Godkjent <input type="checkbox"/> Ikke godkjent <input type="checkbox"/> Ev. Avvik/ID-support/reklamasjon: Dato/Sign.:		

<sup>1</sup> [Loggføring av pakningsvedlegg for analyser, Enhet for Blodtyperologi, ImTra SSK](#)

<sup>2</sup> 0,8 % celler settes i kjøleskap i minimum ett døgn etter mottak, for deretter og kontrolleres for hemolyse.

<sup>3</sup> 3 % celler: Blandes godt opp, ta ut noen få dråper fra hver flaske, sentrifuger og inspiser for hemolyse.

Utarbeidet av: <b>Tone Strai</b> fagbioingeniør	Fagansvarlig: <b>Elin Øvland</b> enhetsleder	Godkjent av: <b>Avdelingssjef Lene Haugen Tryland</b>	Verifisert av: <b>20.09.2024 - Kvalitetskoordinator Kari - Ann Nedal</b>
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

 SØRLANDET SYKEHUS	<b>Nytt lotnummer-/mottakskontrollskjema, Enhet for blodtypeserologi ImTra SSK.</b>				<b>Side: 2</b> <b>Av: 2</b>
Dokumentplassering: II.MSK.ImTra.2.f.16-3	Utarbeidet av: Tone Strai fagbioingeniør	Fagansvarlig: Elin Øvland enhetsleder	Godkjent dato: 25.09.2024	Godkjent av: Avdelingssjef Lene Haugen Tryland	Revisjon: 5.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin SSK/Pasienter og brukere/Blodtypeserologi/Mottakskontroll

**Vedlegg:**

**Kryssreferanser:**

[II.MSK.ImTra.2.f.16-6](#)

[Loggføring av pakningsvedlegg for analyser, Enhet for Blodtypeserologi, ImTra SSK](#)

**Eksterne referanser:**