

Registrering på Hjemmerespirator

Navnelapp:

Kontroll x 2 pr vakt

VTi= tidalvolum, **Ppeak**= maks trykk, **Pmean** = gjennomsnittlig trykk, **Ftot** = resp.frekvens, **SaO2**, **puls**.

Dato												
	D-vakt		A-vakt		N-vakt		D-vakt		A-vakt		N-vakt	
VTi												
Ppeak												
Pmean												
Ftot												
SaO2												
Puls												
Temp D+A												
Blodpr.x 2 pr uke (man + torsd)												

Det er kun eksternbatteri som skal testes for varighet. Ikke teste internbatteri. Dette blir sjekket ved service.

Nødstrøm til medisinsk utstyr er pålagt en periodisk funksjonskontroll. Denne skal verifiseres, og utføres månedlig. Krav til driftstid er **minst 3 timer**, eller det som er angitt i risikovurdering som nødvendig back-up tid.

Dette gjøres for å sikre at utstyret virker ved et reelt behov.

Fjern 230 v tilførsel og bruk utstyret i våken tilstand og under normale driftsforhold. For å få vite **reell varighet** på nødstrøm, brukes utstyret som angitt i evakueringsplan. Koble til 230 v igjen.

Vi har laget et avkrysnings- ark til å bruke når du har utført testen.

Ta tiden som utstyret brukes på nødstrøm, og noter tiden i ruten for aktuell måned.

Battericeller byttes med faste intervall. Dette styres av oss på Behandlingshjelpemidler. Feil som avdekkes under test meldes straks til oss.

Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
Jan.	Febr.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
Jan.	Febr.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
Jan.	Febr.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Des.