

**Vedlikehold BenchMark Ultra. Immunologi. Histologisk enhet. Avd., for patologi. SSK.**

Dokument ID:

**II.MSK.Pat.2.3.3.2-4**

Godkjent dato:

**12.02.2024**

Gyldig til:

**12.02.2026**

Revisjon:

**9.00**

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Histologisk enhet/Immunologisk laboratorium. ARKIVERES: Perm merket «loggark histologisk enhet IMMUN».

Måned/år:		Daglig:																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Tordis	Kjøre vask																															
	Tørke av instrument																															
Fritz	Kjøre vask																															
	Tørke av instrument																															
	Prime																															
		<b>Ukentlig:</b>																														
Backup av Data																																
Utføre "Database Maintanance"																																
Vask «Thermopads» Rengjør avfallsavløp	Tordis																															
	Fritz																															
Slett printet merkelapper																																
Skru av software og PC (når anledning)																																
		<b>Kvartal:</b>																														
		<b>Februar</b>							<b>Mai</b>							<b>August</b>							<b>November</b>									
Kjør test av «Vortex mix Ultra» *	Tordis																															
	Fritz																															
Dekontaminering	Tordis																															
	Fritz																															
Periodiske vedlikehold (med.tek):		<b>Dato sist PV utført:</b>														<b>Neste PV planlagt:</b>																

\*Hematoxylin II settes i pos.26, og det legges et tomt glass med blank etikett pos.7. vurder om jevn fordeling av lillafargen.

**Kryssreferanser**

Utarbeidet av:

**Fagbioingeniør Margrete Bodin Erdal**

Fagansvarlig:

**Margrete Bodin Erdal**

Godkjent av:

**Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen**

Dokument-id:  
II.MSK.Pat.2.3.3.2-4Utarbeidet av:  
Fagbioingeniør Margrete Bodin  
ErdalFagansvarlig:  
Margrete Bodin ErdalGodkjent dato:  
12.02.2024Godkjent av:  
Avdelingsjef Hilde Bjørnestøl HansenRevisjon:  
9.00**Eksterne referanser**