

**Loggskjema for vedlikehold av Nefelometer instrumentene. Enhet for immunologi. ImTra SSK.**

Dokumentplassering:

II.MSK.ImTra.2.g.2-3

Godkjent dato:

18.11.2024

Gyldig til:

18.11.2027

Dato endret:

18.11.2024

Revisjon:

2.13

Medisinsk serviceklinikk/Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin SSK/Pasienter og brukere/Immunologi/Prospec

DISTRIBUSJONSliste: EK, Perm for vedlikehold.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 18.11.2027 uten endringer i dokumentet.

År:

Ukentlig vedlikehold. Se prosedyre for fremgangsmåte. Instrument nr.	Uke:		Uke:		Uke:		Uke:		Bemerkninger:
	1	2	1	2	1	2	1	2	
1. Sjekk av probe									
2. Vask av probe (pipettestasjonen og pipetten)									
3. Sjekk sprøyten for lekkasje.									
4. Sjekk slangene									
5. Utfør en "shut down" av softwaren.									
6. Tørk av reagenskammeret for kondens									
7. Start opp Instrumentet og software. Husk «restart» av online.									
8. Gå inn i QC på ProSpec (for å unngå overbelastning).									
Rengjør med vann og sprit på tastatur, mus og håndtak.									
Dato/Signatur:									

Månedlig vedlikehold. Se prosedyre for fremgangsmåte. Ukentlig vedlikehold utføres først.

9. Desinfisering av slangesystemet og vask nivåfølerne.		
10. Rinse av systemet.		
11. Bytte av filter(slangen for destillert vann).		
Dato/Signatur:		

[II.MSK.ImTra.2.g.2-1](#) Nefelometer, Prospec og Atellica NEPH630, - Vedlikeholdsrutiner.
Enhet for immunologi. ImTra SSK.

DokumentID:D37081

Utarbeidet av: Kristine Thomassen Berget Enhetsleder	Fagansvarlig: Mariann H. Finne og Kristine T. Berget	Godkjent av: Avdelingsleder Lene Haugen Tryland	Verifisert av: 16.12.2015 - Synnøve Nævdal, - Kristine Thomassen Berget
---	--	---	---