

**Loggskjema for vedlikehold av Phadia 1000 instrumentet. Enhet for immunologi. ImTra SSK.**

Dokumentplassering:

II.MSK.ImTra.2.g.1-5

Godkjent dato:

09.10.2024

Gyldig til:

09.10.2027

Dato endret:

09.10.2024

Revisjon:

2.06

Medisinsk serviceklinikk/Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin SSK/Pasienter og brukere/Immunologi/Phadia

DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Perm for vedlikehold.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 09.10.2027 uten endringer i dokumentet.

År:

Ukentlig vedlikehold. (Ukentlig, Aborted assay eller ved Stopp under analysering) Det tar ca. 59 minutter. Se PRIME brukermanual for fremgangsmåte.	Uke:	Uke:	Uke:	Uke:
1. Utføre "Weekly rinse"				
2. Vask og tørk av dunker				
3. Vask Loading rack området med 70% sprit.				
4. Rengjøring med 70% sprit på tastatur og mus				
5. Slå av og på PC for å unngå overbelastning.				
6. Rengjør prøvepipetteringsenheten og dråpe beskytter kopp. Instrumentet må være slått av.				
Bemerkninger:				
Dato/Signatur:				

Månedlig vedlikehold. (månedlig, problem med presisjon eller overdraging og ved stans) Det tar ca. 2,5 timer. Se PRIME brukermanual for fremgangsmåte.	Rengjøring av viktige enheter: Vaskes med dest.vann først og 70% sprit etterpå. Instrumentet må være slått av, f.o.m. punkt 3 til 10.
Punktene 2. til 6. under ukentlig vedlikehold skal også utføres.	6. Rengjør vaskehoder og stopsolution dispenser
1. Utfør desinfeksjonsprosedyre. Følg instruksjoner på instrumentet. Tillages 1% hypoklorittløsning. (Av 14% konsentrat, 200ml hypokloritt + 2600 ml dest. vann)	7. Rengjør Konjugat pipette
2. Utfør «Weekly rinse» etter fullført desinfeksjonsprosedyre.	8. Rengjør Development solution pipette
3. Vask og tørk av dunker	9. Rengjør ejection tool og transfer tool
4. Kaste pålastede kurvekontroll- og kalibrerings stripser.	10. Smøre o ringer(Rinse, Vaskebuffer, Stoppløsning)
5. Rengjør Glassoverflater med lettluftet papirklut med vann og øvrige overflate med 70 % spirit.	11. Rengjør hylla til stoppløsning og hylla til vaskeløsning
Dato /Signatur	Dato/Signatur

Kryssreferanser:

[II.MSK.ImTra.2.g.1-2](#)

Allergi på Phadia 1000. Enhet for

Immunologi, ImTra SSK

DokumentID:D37083

Utarbeidet av: Kristine Thomassen Berget Enhetsleder	Fagansvarlig: Kristine T. Berget og Sivagowri Kasinathan	Godkjent av: Avdelingsleder Lene Haugen Tryland	Verifisert av: 16.12.2015 - Synnøve Nævdal, 03.04.2020 - Kristine Thomassen Berget
--	--	---	--