

**Shimadzu - sletting av pasienter ved full disk - Rad.avd.SSA**

Side 1 av 2

Dokumentplassering:

**II.MSK.Rad SSA.9.1.12-5**

Godkjent dato:

**08.05.2024**

Gyldig til:

**08.05.2026**

Dato endret:

**08.05.2024**

Revisjon:

**2.07**

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSA/Opplæring / teknisk støtte/Opplæring / Bruksanv./Opplæring / Bruksanv. Mobil


DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Eventuelt hvor godkjent papirversjon finnes.


ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Endret mal

# PAST 1

Blinker gult/rødt

- Gå inn på PAST
- Select All Studies
- Trykk Søppelkasse
- Trykk Delete
- Warning: OK to delete the Study - OK

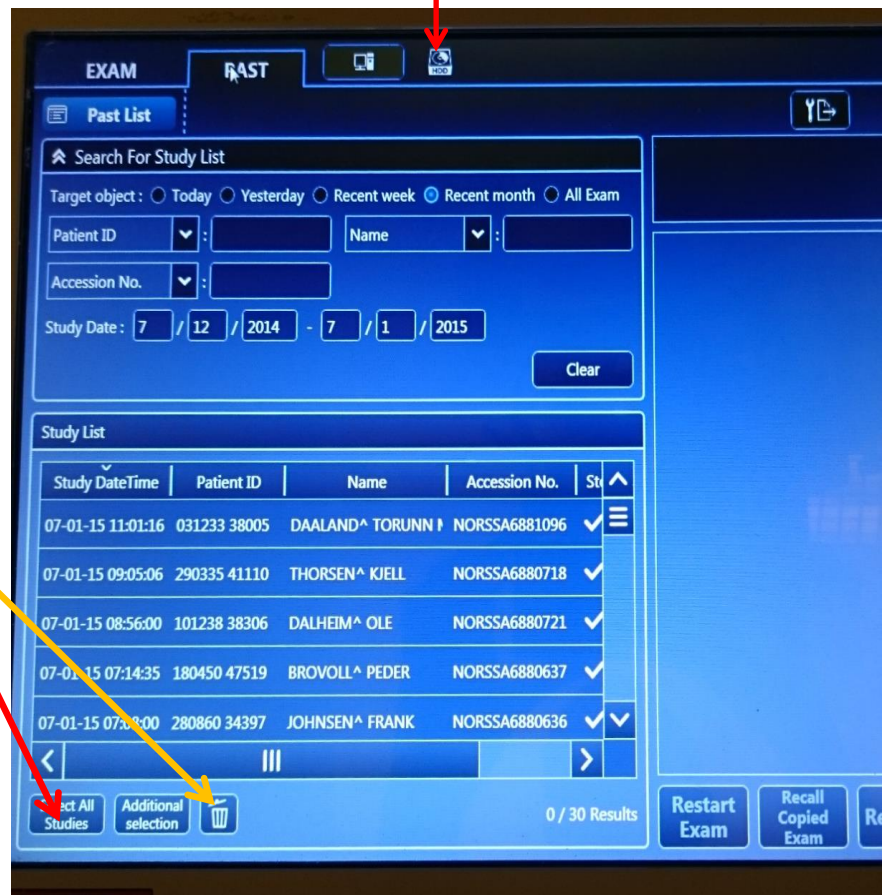

		<b>Shimadzu - sletting av pasienter ved full disk - Rad.avd.SSA</b>			<b>Side: 2</b> <b>Av: 2</b>
Dokumentplassering: II.MSK.Rad.SSA.9.1.12-5	Utarbeidet av: Vigdis Rasmussen	Fagansvarlig: □	Godkjent dato: 08.05.2024	Godkjent av: Avd. leder Inger Wenche Nilsen	Revisjon: 2.07

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSA/Opplæring / teknisk støtte/Opplæring / Bruksanv./Opplæring / Bruksanv. Mobil

# PAST 2

Blinker **gult/rødt**

- Gå inn på PAST
- Velg Additional selection
- Skriv inn Study Date eller velg Recent month/week
- Trykk på søppelkasse
- Trykk så Delete
- Warning: OK to delete the Study - OK

