

 <b>Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service</b>		<b>Generelt dokument</b>	
<b>A6 - Arbeidsstasjonen</b>			Side 1 av 2
Dokumentplassering: <b>II.DKS.Rad SSA.1.4.2.1.10-5</b>	Godkjent dato: <b>25.11.2025</b>	Gyldig til: <b>25.11.2027</b>	Dato endret: <b>25.11.2025</b>
			Revisjon: <b>2.03</b>

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Radiologisk avdeling SSA/Administrasjon og ledelse/Opplæring/Kompetanse/Opplæring

DISTRIBUSJONSLISTE: EK, 2 godkjente papirversjoner finnes på lab A6

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 25.11.2027

## ARBEIDSSTASJONEN:

**SKRU PÅ:** på datamaskinen

- Login: sdc
- Password: adw4.4

**NB!!**

Det er ingen stjerner/ prikker som markerer at passordet er skrevet inn. Feltet blir stående blankt. Men så lenge passordet er skrevet inn korrekt, blir man innlogget etter å ha trykket enter.

**SKRU AV:**

System	▼
--------	---



Shutdown
----------




Yes
-----

## OVERFØRE BILDER TIL PACS:

- Marker den undersøkelsen og serien som skal overføres
- Klikk på ikonet som ser ut som en liten datamaskin på linjen "Series" (omtrent midt på skjermen)
- Det kommer opp et skjermbilde; "Push selected serie(s)"
- Velg PACS Store
- Trykk Push
- Bildene er nå over i PACS

DokumentID:D40605

Utarbeidet av: <b>Darlene Sandvik</b>	Fagansvarlig: <b>Darlene Sandvik</b>	Godkjent av: <b>Avd. leder Inger Wenche Nilsen</b>	Verifisert av: □
--	---	---	---------------------

 <b>SØRLANDET SYKEHUS</b>	<b>A6 - Arbeidsstasjonen</b>				<b>Side: 2</b> <b>Av: 2</b>
Dokumentplassering: II.DKS.Rad SSA.1.4.2.1.10-5	Utarbeidet av: Darlene Sandvik	Fagansvarlig: Darlene Sandvik	Godkjent dato: 25.11.2025	Godkjent av: Avd. leder Inger Wenche Nilsen	Revisjon: 2.03

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Radiologisk avdeling SSA/Administrasjon og ledelse/Opplæring/Kompetanse/Opplæring

## HENTE BILDER FRA PACS:

- Klikk på **Search New** nederst på den venstre skjermen. Det vil da komme opp et søkefelt på den høyre skjermen. Skriv inn for eksempel pasientnavn og fødselsdato.
- Klikk deretter på ikonet **Search** oppe til høyre på den høyre skjermen.
- Marker aktuell undersøkelse.
- Klikk på det lille ikonet som viser en datamaskin på linjen examinations.
- Det kommer opp et skjermbilde med spørsmålet "Get selected exam(s)?"
- Klikk YES
- Etter noen sekunder vil statusfeltet nede til venstre på den venstre skjermen begynne å blinke grønt. Når det har sluttet å blinke (dette kan ta noe tid, avhengig av hva slags undersøkelse som skal hentes frem) er bildene ferdig lastet.
- Pasienten kan da letes opp i examinations på den venstre skjermen.
- Dobbelklikk på pasienten, undersøkelsen eller et av bildene på høyre siden av venstre skjerm.
- Velg ønsket bilde/ serie.
- Det skjermbildet som vises på den venstre skjermen på arbeidsstasjonen er det samme skjermbildet som vises på slaveskjermen (skjermen lengst til høyre i undersøkelsesrommet)