

		Medisinsk serviceklinikk			Generelt dokument
A6 - Arbeidsstasjonen					Side 1 av 2
Dokumentplassering: II.MSK.Rad SSA.9.1.10-5		Godkjent dato: 17.10.2023	Gyldig til: 17.10.2025	Dato endret: 17.10.2023	Revisjon: 2.02

Medisinsk serviceklinikk\Radiologisk avdeling SSA\Opplæring / teknisk støtte\Opplæring / Bruksanv.\Opplæring / Bruksanv. A6
 DISTRIBUSJONSLISTE: EK, 2 godkjente papirversjoner finnes på lab A6
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 17.10.2025 uten endringer i dokumentet.

ARBEIDSSTASJONEN:

SKRU PÅ: på datamaskinen

- Login: sdc
- Password: adw4.4

NB!!

Det er ingen stjerner/ prikker som markerer at passordet er skrevet inn. Feltet blir stående blankt. Men så lenge passordet er skrevet inn korrekt, blir man innlogget etter å ha trykket enter.

SKRU AV:

System	▼
--------	---



Shutdown




Yes

OVERFØRE BILDER TIL PACS:

- Marker den undersøkelsen og serien som skal overføres
- Klikk på ikonet som ser ut som en liten datamaskin på linjen "Series" (omtrent midt på skjermen)
- Det kommer opp et skjermbilde; "Push selected serie(s)"
- Velg PACS Store
- Trykk Push
- Bildene er nå over i PACS

DokumentID:D40605

Utarbeidet av: Darlene Sandvik	Fagansvarlig: Darlene Sandvik	Godkjent av: Avd. leder Inger Wenche Nilsen	Verifisert av:
--	---	---	----------------

 SØRLANDET SYKEHUS	A6 - Arbeidsstasjonen				Side: 2 Av: 2
Dokumentplassering: II.MSK.Rad SSA.9.1.10-5	Utarbeidet av: Darlene Sandvik	Fagansvarlig: Darlene Sandvik	Godkjent dato: 17.10.2023	Godkjent av: Avd. leder Inger Wenche Nilsen	Revisjon: 2.02

Medisinsk serviceklinikk\Radiologisk avdeling SSA\Oppl ring / teknisk st tte\Oppl ring / Bruksanv.\Oppl ring / Bruksanv. A6

HENTE BILDER FRA PACS:

- Klikk p  **Search New** nederst p  den venstre skjermen. Det vil da komme opp et s kefelt p  den h yre skjermen. Skriv inn for eksempel pasientnavn og f dselsdato.
- Klikk deretter p  ikonet **Search** oppe til h yre p  den h yre skjermen.
- Marker aktuell unders kelse.
- Klikk p  det lille ikonet som viser en datamaskin p  linjen examinations.
- Det kommer opp et skjermbilde med sp rsm let "Get selected exam(s)?"
- Klikk YES
- Etter noen sekunder vil statusfeltet nede til venstre p  den venstre skjermen begynne   blinke gr nt. N r det har sluttet   blinke (dette kan ta noe tid, avhengig av hva slags unders kelse som skal hentes frem) er bildene ferdig lastet.
- Pasienten kan da letes opp i examinations p  den venstre skjermen.
- Dobbelklikk p  pasienten, unders kelsen eller et av bildene p  h yre siden av venstre skjerm.
- Velg  nsket bilde/ serie.
- Det skjermbildet som vises p  den venstre skjermen p  arbeidsstasjonen er det samme skjermbildet som vises p  slaveskjermen (skjermen lengst til h yre i unders kelsesrommet)