

**Rengjøring CT Exprès Rad.avd. SSA**

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

**II.MSK.Rad SSA.2.2.10-6**

Godkjent dato:

**20.11.2023**

Gyldig til:

**20.11.2025**

Dato endret:

**20.11.2023**

Revisjon:


**1.05**

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSA/Pasienter og brukere/CT/CT Diverse

DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Eventuelt hvor godkjent papirversjon finnes.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 20.11.2025 uten endringer i dokumentet.

- Slå alltid AV strømmen på baksiden av hovedenheten før systemet rengjøres
- Under normal bruk tørkes saltvanns- eller kontrastmiddelsøl opp med en fuktig klut og varmt vann. Bruk kun alkoholbaserte antibakterielle løsninger og en klut for å desinfisere CT Exprès™ 3D
- Hvis det er kontrastmiddel- eller saltvannssøl på flaskeholderne, kontrollerer du og rengjør punkter som illustrert under
- Rengjør sporene for dagsett (inkludert den lille plattformen), samt sensorene, med egnet klut eller fuktig bomullspinne. Kontrast her kan gi falske varsel om luft i systemet
- Rengjøring skal skje ved behov, samt hver morgen av nattevaktene (sjekkliste)

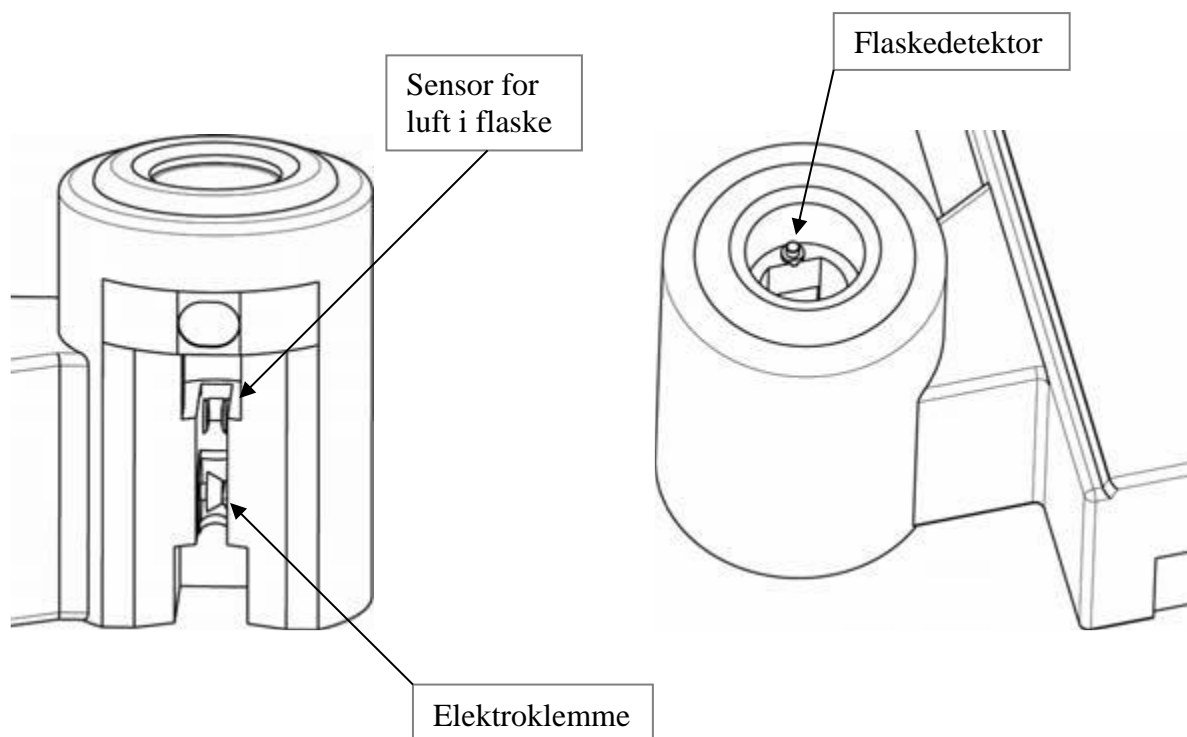

DokumentID:D41006

 Utarbeidet av:  
**Morten Opheim/ Unni  
 Omholt Volden**

 Fagansvarlig:  
**Morten Opheim/ Unni  
 Omholt Volden**

 Godkjent av:  
**Avd. leder Inger Wenche Nilsen**

 Verifisert av:  
 ☐