		<b>Medisinsk serviceklinikk</b>		<b>Generelt dokument</b>
<b>Urinalyser på Clinitek Status - PNA prosedyre, Medbio SSK</b>				Side 1 av 3
Dokumentplassering: <b>II.MSK.MBio.2.4.10.2-4</b>	Godkjent dato: <b>13.05.2024</b>	Gyldig til: <b>13.05.2026</b>	Dato endret: <b>13.05.2024</b>	Revisjon: <b>9.00</b>

Medisinsk serviceklinikk\Avd for medisinsk biokjemi SSK\Pasienter/brukere\Pre- og postanalytisk enhet\PNA

DISTRIBUSJONSLISTE: EK,

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Endret fra Multistix 8SG til multistix 7.

## HENSIKT

Prosedyren skal sikre riktig analysering av urinstrimmeltest på Clinitek Status

## OMFANG

Prosedyren gjelder for personell ved husets avdelinger og poliklinikker som er opplært i bruk av Clinitek Status

## UTFØRELSE

Prøvemateriale: Frisklatt, romtemperert urin. Morgenurin anbefales, men spot urin kan også benyttes.

Teststrimmel: Multistix 7. Oppbevares i romtemperatur, med lokket påskrudd. Holdbar til påført utløpsdato.

Analysering og oppbevaring: **Bland urinprøven godt før analysering** for å sikre riktig resultat. Ved henstand vil celler og bakterier kunne synke til bunns og gi feil avlesning. Dersom prøven ikke kan analyseres straks bør den oppbevares kjølig, og analyseres innen 4 timer etter prøvetaking. Dersom urinprøven har unormal farge (eks. rød, sort eller brun), må urinprøven leveres MedBio for vurdering.

**Merk uringlasset (ikke korken) tilstrekkelig med pasientens navn og 11-sifret personnummer.**

Analysering: Skjermen berøres ved bruk av finger.


- **Strip Test.**
- **Enter new operator name** – benytt strekkodeleser og scann ditt brukernavn. Evt. tast inn manuelt ved hjelp av knappen som er merket ABC.
- **Enter new patient** – scann pasientens 11-sifret personnummer. For å sikre svaroverføring til DIPS er det viktig at alle 11 siffer i pasientens personnummer registreres.
- **Prepare test.**
  - Ta ut en strimmel (Multistix 7), sku på lokket igjen.
  - Berør feltet START, du har nå 8 sekunder på deg til å gjøre punktene under.
  - Dypp strimmelen i en godt blandet, romtemperert urinprøve.
  - Dra strimmelen forsiktig langs kanten på uringlasset for å fjerne overskuddsurin.
  - Sett så strimmelen, med kanten ned på et absorberende papir.
  - Plasser strimmelen i analysesporet på matebordet i instrumentet.
  - Etter analysering: Kast teststrimmelen i vanlig avfall og tørk av analysesporet med en fuktig tupfer.

**Dersom feil ID benyttes må MedBio kontaktes umiddelbart slik at feil svar slettes fra DIPS.**

DokumentID:D25750

Utarbeidet av: <b>Fagbioingeniør Aina Olesen</b>	Fagansvarlig: <b>Enhetsleder Nils Tryland</b>	Godkjent av: <b>Avdelingssjef Marianne Skomedal</b>	Verifisert av: <b>13.05.2024 - Kvalitetskoordinator Ingunn Gåsvær</b>
---	--	--	--

Utskriftsdato: 23.09.2024

 <b>SØRLANDET SYKEHUS</b>	<b>Urinalyser på Clinitek Status - PNA prosedyre, Medbio SSK</b>				<b>Side: 2</b> <b>Av: 3</b>
Dokumentplassering: II.MSK.MBio.2.4.10.2-4	Utarbeidet av: Fagbioingeniør Aina Olesen	Fagansvarlig: Enhetsleder Nils Tryland	Godkjent dato: 13.05.2024	Godkjent av: Avdelingssjef Marianne Skomedal	Revisjon: 9.00

Medisinsk serviceklinikk\Avd for medisinsk biokjemi SSK\Pasienter/brukere\Pre- og postanalytisk enhet\PNA

#### Andre viktige forhold:

- Matebordet må ikke skyves inn i instrumentet – instrumentet trekker automatisk inn matebordet når det er gått 8 sekunder etter at START er trykket. Dersom matebordet skyves inn, vil det kunne sette seg fast og apparatet må til service.
- Online forbindelse mellom apparat og DIPS vises ved en datamaskin oppe i venstre hjørne. Dersom det er kryss over denne betyr det at online forbindelse mangler. Sjekk at nettverkskabel er satt ordentlig i, kontakt eventuelt Medisinsk biokjemi.
- Bytte av papir:
  - Åpne begge lokkene bak på Clinitek Status og følg anvisningen for papirbytte.
  - Fjern noen runder av papirrullen slik at alle rester av lim forsvinner.
  - Klipp enden som en spiss, da er det enklere å få den riktig på plass i skriveren.
  - Legg papirrullen riktig vei, med «blank» side vendt opp. Dersom rullen legges feil vei vil det ikke komme skrift på papiret.
  - Bruk kun papirrull som er egnet for Clinitek Status.

#### FEILKILDER

- For kald eller varm urinprøve.
- For gammel urinprøve.
- Ikke blandet eller dårlig blandet urinprøve.
- Sterk egenfarge på prøven.
- Medikamentbruk – se pakningsvedlegg for aktuelt medikament for utvidet informasjon.
- Instrumentelle forhold som feil bruk av instrumentet, feil oppbevart stix, feilregistrering av pasientinfo.

#### VEDLIKEHOLD


Superbruker på din avdeling/poliklinikk har ansvar for å lage et system for vedlikehold. Oppfordrer til bruk av skjema for enklere oversikt: [Vedlikeholdsskjema Clinitek Status, Medbio SSK](#)

#### Daglig:

- Løft ut testholderen fra matebordet og skyll under rennende vann, tørk godt.

#### Ukentlig:

- Matebordet med testholder trekkes forsiktig ut av instrumentet og plasseres i virkon i 10 minutter. OBS: Delen med den hvite kalibreringsstripen må ikke komme i kontakt med virkon.
- Delene skylles så i vann, og tørkes godt. OBS: Kalibreringsstripen må ikke komme i kontakt med vann. Dersom dette skjer må det tørkes vekk med en ren bomullspinne. Ved synlig søl, hakk og lignende på kalibreringsstripen – kontakt Medisinsk biokjemi.
- Slå av instrumentet og vask det utvendig med en fuktig klut eventuelt med såpevann.
- Dersom skjermen er synlig tilgriset så kan den vaskes ved å bruke et papirhåndkle fuktet med virkon. La papirhåndkle ligge på i 10 minutter for optimal effekt. Tørk deretter av med rent vann.
- Barkodeleseren desinfiseres ved bruk av overflatedesinfeksjon.

 SØRLANDET SYKEHUS	<b>Urinalyser på Clinitek Status - PNA prosedyre, Medbio SSK</b>				<b>Side: 3</b> <b>Av: 3</b>
Dokumentplassering: II.MSK.MBio.2.4.10.2-4	Utarbeidet av: Fagbioingeniør Aina Olesen	Fagansvarlig: Enhetsleder Nils Tryland	Godkjent dato: 13.05.2024	Godkjent av: Avdelingssjef Marianne Skomedal	Revisjon: 9.00

Medisinsk serviceklinikk\Avd for medisinsk biokjemi SSK\Pasienter/brukere\Pre- og postanalytisk enhet\PNA

**FORBRUKSVARER – bestillingsnummer:**

- Papir: 10003393.
- Multistix 7: 10175295

**VED PROBLEMER**

Dagtid: Tlf. 3458. Vakt/utom ordinær arbeidstid: Tlf. 3444.

**Kryssreferanser:**

[II.MSK.MBio.2.4.10.2-9 Vedlikeholdsskjema Clinitek Status, Medbio SSK](#)

**Eksterne referanser:**

[Brukerhåndbok Clinitek Status + Analyser](#)