

Nexpowder, hemostase ved øvre GI blødning, gastrolab med. avd. SSK,

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

II.SOK.MEK.MEK.2.2.GL-47

Godkjent dato:

17.06.2024

Revideres innen:

17.06.2026

Sist endret:

17.06.2024

Revisjon:

4.00

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Medisin SSK/Pasienter og brukere

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

HVA ER NEXPOWDER

- Pulver som skaper en endoskopisk hemostase på blødninger i øvre GI-traktus.
- Når pulveret kommer i kontakt med aktiv blødningskilde, absorberer pulveret vann og danner en mekanisk barriere over blødningskilden.
- Nexpowder kan ikke brukes på variceblødninger

Fremgangsmåte:

- **Steg 1:** Pakk ut alle tre pakningene i eska. Sjekk dato og pakning for skader.
- **Steg 2:** Koble kateter på pistolen. Det skyves inn i sporet på toppen av pistolen, med filterdelen inn i pistolen. Sjekk at hendelen er lukket.
- **Steg 3:** Ta lokket av pulverkolben og monter den på pistolen. Hold kolben riktig vei så pulveret ikke fallet ut i prosessen.
- **Steg 4:** Trekk ut batterisperren fra pistolen og start pistolen. Pistolen skal være i gang når kateteret settes ned i biopsikanalen. Dette for å unngå at det kommer fuktighet inn i kateteret på vei ned. Det må ikke suges når kateteret føres inn i skopet.
- **Steg 5:** Når kateteret er i riktig posisjon, 1-2 cm fra blødningen, åpnes det for pulveret ved å dra den rød spaken opp. Åpne i ca. 2 sek. Og lukk igjen. Pistolen blåser konstant så om en holder åpent hele tiden vil alt pulveret tømmes i løpet av kort tid. Åpne og lukke i samarbeid med legen.
- **Steg 6:** Skru av pistolen når kateteret dras opp. Ta ut batteriene og kast resten i restavfall.

Kryssreferanser

Eksterne referanser

Utarbeidet av: Katrine Vårild Foss	Fagansvarlig: Janicke Lindebø Aamot	Verifisert av: □	Godkjent av: Audun Hasund	Dok.nr: D44101
---------------------------------------	--	---------------------	------------------------------	-------------------