

CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe. Innstilling

Side 1 av 4

Dokument ID:
1.3.12-1Godkjent dato:
08.05.2023Gyldig til:
08.05.2025Revisjon:
2.03

Generelle fagprosedyrer/CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe

Innstilling av CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe: **Antibiotika.**

Materialet du skal bruke:

- *Infusjonspose NaCl/Glucose*
- *Infusjonssett*
- *CADD-SOLIS pumpe + nøkkel til pumpen*
- *Rumpetaske/sekk*

Trinn 1. Innstilling av maskinen.

1: Slå på pumpen på høyre side.

2: Trykk på oppgaver.

3: Bruk piltastene til displayet viser «Vis avanserte oppgaver», trykk «velg»

4: Bruk piltastene til displayet viser «Start ny pasient», trykk «velg».

5: Maskinen skriver «Ved å utføre denne oppgaven, overskrides alle infusjonsinnstillinger.», trykk Fortsett.

6: Tast inn koden 997 ved hjelp av piltastene, trykk «aksepter verdi».

7: Velg den hovedinnstilling du ønsker å innstille pumpen til. Kontinuerlig brukes for eksempel ved hydrering, intermitterende infusjon er når dosen skal gis med ett regelmessig intervall.

8: Bruk piltastene til å velge den behandling du ønsker å innstille pumpen til.

9: Maskinen skriver «Velg Kvalifikator», er det korrekt stoff på skjermen, trykk velg.

 SØRLANDET SYKEHUS	CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe. Innstilling				Side: 2 Av: 4
Dokument-id: I.3.12-1	Utarbeidet av: Marianne Jacobsen	Fagansvarlig: Rita Hellenen	Godkjent dato: 08.05.2023	Godkjent av: Per Engstrand	Revisjon: 2.03

Generelle fagprosedyrer/CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe

10: Maskinen skriver «Er dette korrekt?» Se over at det som står på maskinen stemmer overens med den behandling du skal innstille. Trykk «Ja» dersom alt stemmer.

11: Maskinen skriver «Gå igjennom pumpeinnstillinger.», Trykk «Gå igjennom»

12: Bruk piltastene og innstill neste dose ved å trykke «Velg». Innstill tidspunkt og trykk «Bekreft».

13: Pumpen spør om det er rett forsinkelse du ønsker. Dersom dette er korrekt, trykk «Ja».

14: Dersom resten av innstillingene stemmer overens i infusjonsvolum, infusjonsvarighet, infusjonssyklus, inf. hastighet, KVO-hastighet og Reservoarvolum er korrekt, trykk «Ja».

Ved rettelser til innstillingene.

1: Innstill nytt «Infusjonsvolum»: Dette er mengden du skal gi pr. gang. Trykk på «Velg» og sett inn dosen. Dosen finnes ved å dividere det antall doser du skal gi i forhold til det fulle antall ml. Det er i infusjonsposen.

2: « KVO»(Keep vein open) avhenger av medikament og venetilgang. Ved Piccline KVO=0,5ml/t, CVK KVO=2 ml/t og PVK 5ml/t

3: «Reservoarvolum» er det samlede volum i posen.

4: Gå opp til toppen av innstillingene ved hjelp av piltastene og sjekk innstillingene. Dersom de er som du ønsker trykk «Aksepter verdi» ved hver enkelt variabel, og trykk deretter neste.

 SØRLANDET SYKEHUS		CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe. Innstilling			Side: 3 Av: 4
Dokument-id: I.3.12-1	Utarbeidet av: Marianne Jacobsen	Fagansvarlig: Rita Hellen	Godkjent dato: 08.05.2023	Godkjent av: Per Engstrand	Revisjon: 2.03

Generelle fagprosedyrer/CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe

Trinn 2: Tilkobling av infusjonspose.

- 1: Sett spiken fra infusjonssettet i infusjonsposen som er ferdigblandet med antibiotika og tømt for luft.
- 2: Ta låsearmen ned i høyre side og sett kasettbeslaget på bunnen så det sier klikk. Ta opp låsearmen igjen, og lås med nøkkelen.
- 3: Maskinen skriver «Fylle inf. slangen?», trykk «Ja» og fyll slangen. Trykk på «Stopp» når den er fylt.
- 4: Maskinen skriver «Start pumpe?», trykk «nei» Den skal startes når pasienten er koblet til pumpen.

Trinn 3: Tilkobling til pasient.

- 1: Koble til infusjonssettet etter vanlig prosedyre avhengig av hvilken venetilgang pasienten skal bruke.
- 2: Sjekk at du har husket å åpne alle klemmer som er mellom pasient og pumpe.
- 3: Husk utfylling av arbeidsskjema før pasienten skrives ut med pumpe.

Infusjonsvolum: Den mengde væske som skal gis pr gang.

Infusjonsvarighet: Den tid man ønsker at den valgte dosen skal ta.

Infusjonssyklus: Hvor lang syklusen skal vare før neste dose gis. Inkluderer infusjonsvarighet og ventetid før neste dose.

Infusjonshastighet: Den hastighet infusjonen kommer til å ha pr.time.

KVO-hastighet: Keep-vain-open dersom man ønsker å holde kateteret åpen med en liten dose.

Reservoarvolum: Det samlede volum i infusjonsposen

 SØRLANDET SYKEHUS	CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe. Innstilling				Side: 4 Av: 4
Dokument-id: I.3.12-1	Utarbeidet av: Marianne Jacobsen	Fagansvarlig: Rita Hellen	Godkjent dato: 08.05.2023	Godkjent av: Per Engstrand	Revisjon: 2.03

Generelle fagprosedyrer/CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe

Kryssreferanser

[I.3.12-3](#)

[I.3.12-19](#)

[I.3.12-20](#)

[Sjekkliste for pasienter som skrives ut med CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe.](#)

[Pasientinformasjon ved oppvækning til CT via infusjonspumpe.](#)

[Pasientinformasjon ved antibiotikabehandling via CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe.](#)